

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff


Funktionale Eleganz in der Pflege



hospitel

Spezial-Pflegebetten



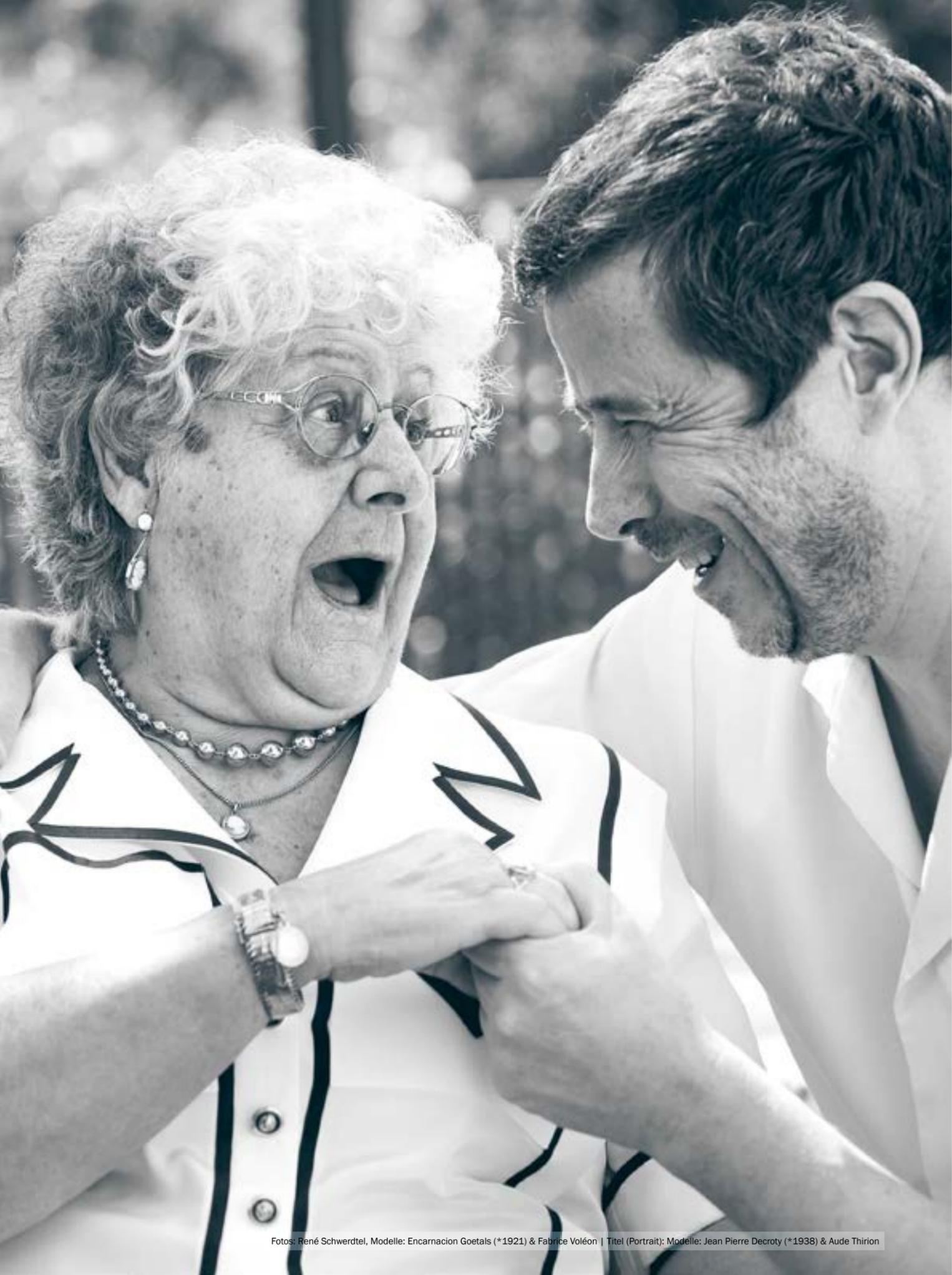

Das hospitel-Konzept

Mehr als nur ein Pflege- oder Klinikbett: hospital + hotel = hospitel

Das hospitel-Konzept verbindet Wohnlichkeit, Komfort und Multifunktionalität. Ihr Einsatzfeld ist weniger die Akutversorgung im Krankenhaus, sondern primär die postakute Pflege von Patienten in den Bereichen:

- Psychiatrie
- Langzeitpflege
- Geriatrie
- Orthopädie
- Rehabilitation
- Plastische Chirurgie

Zusätzliche Optionen und Zubehöre schützen Personal und Patienten gleichermaßen, vor allem in psychiatrischen Einrichtungen und bei unruhigen Patienten.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wohnliches Design für schnelle Genesung (healing environment)
- Mobilisationsfreundliche Seitensicherungen: ohne große Mittellücke, ohne Pfosten und Schienen
- Leichte Reinigung durch Kunststoffoberflächen
- Vermeidung von „cross infection“ durch abklappbare Kopfteillösung + protektorfreie Seitensicherung
- Automatikfunktionen: Cardiac Chair und elektrische Beinhochlage
- Einhand-CPR, von beiden Seiten erreichbar
- Einhand-Bettverlängerung
- BiNetic-Frame zur Dekubitusprävention und ergonomische Komfortsitzposition

Die hospitel Wohnidee



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, warme Atmosphäre, in der sich Patienten aufgehoben und geborgen fühlen. Das „healing environment“ sorgt für eine schnelle Genesung.



Niedrigflugebett sentida 6 im Design A10



Nachttisch vivo E2T



Dekor Kirsche

hospitel | Funktionalität und Wohnlichkeit

01

Patentiertes SafeFree®-Seitensicherungskonzept

Oft nachgeahmt, nie erreicht – unser Beitrag für weniger Fixierung im Sinne des Werdenfelser Wegs* und des Redufix**-Projektes

- Geteilte Seitensicherung, jeweils in 4 Höhen einstellbar
- Kein Mittelpfosten, keine gefährliche Mittellücke

02

3-Stopp-Strategie***

zur Höhenverstellung:

- Sturzprävention in der Schlafphase bei 27 cm Betthöhe
- Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe bei 41 cm Betthöhe
- Optimale Pflegeposition bei 80 cm Betthöhe

03

BiNetic-Liegefläche

mit doppeltem Rückzug:

Echte Dekubitusprävention - mehr als nur eine sogenannte DBfK-Rückenlehne

- Ihr Plus: Reduktion der Beckenkompression sowie der Reibungs- und Scherkräfte durch Beinlehnen-Rückzug um 6 cm
- DBfK-Rückenlehnenrückzug um 11 cm

04

Design-Handschalter

Verbesserte und erweiterte Funktionalität

- 3 Sicherheitsstufen einstellbar: Pflege-, Patienten- und Sicherheitsmodus
- 2 Automatikpositionen: Komfortsitz- und Prophylaxe-Automatik
- Mobilisierungsfunktion
- Nachtlichtsteuerung
- Separate Beinlehnenverstellung
- Spielschutz



NEU!

Jetzt auch mit antimikrobiellen Oberflächen erhältlich.

05

Nachtlichtfunktion

Optional kann ein Nachtlicht integriert werden

- Erleichterung der Orientierung bei Nacht
- Mehr Sicherheit für den Patienten
- Leichte Netzanschlusskontrolle
- Steuerung per Handschalter

06

Fahrbarkeit sentida 6 (Abb.)

- Wahlweise 100 mm Decora, 125/150 mm „Cover Design“ Leichtlaufrollen oder 125 mm „LINEA“ Doppellaufrolle (s. Abb.)
- Problemloser Transport auch außerhalb des Patientenzimmers
- Zentraler Bremsbügel (fußseitig) mit integriertem Richtungsfeststeller
- 4-Rollen-Zentralfeststellung

Technische Daten*

- Höhenverstellbereich: 27-80 cm
- Sichere Arbeitslast: 225 kg



Die hospitel-Ausstattung ist auch kombinierbar mit:



movita

movita casa

carisma


sentida 1, 3, 4

sentida 5

3 Bettlängen | 3-Stopp-Strategie

200 cm

Bettlänge 200 cm:
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne Mittellücke > 318 mm* und ohne Protektor

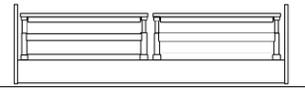

220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm: ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet



210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm: Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehöre und ohne Lücke > 318 mm**



3 Bettlängen
ohne Mittellücke > 318 mm
und ohne Mittelpfosten

Alle Pflegebetten von wissner-bosserhoff verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung. Durch die **Express-Bettverlängerung** (s. Abb. unten/Option) lässt sich sentida mit **geteilten Seitensicherungen** flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen anpassen. Dabei werden in jeder Konfiguration die Vorgaben der neuen Norm IEC 60601-2-52 eingehalten.

3-Stopp-Strategie –
sicher schlafen,
mobilisieren & pflegen


sentida 6 besitzt nicht nur einen großen **Höhenverstellbereich von 27 bis 80 cm**, sondern verfügt darüber hinaus dank intelligenter Steuerung über einen Kollisionsschutz beim Einstellen der Komfortsitzposition. Dies wird insbesondere in Kombination mit der Bettverlängerung auf 220 cm ein unverzichtbarer Vorteil.

IVS = Intelligentes Vertikalisiertungs-System:

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzposition aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung

27 cm

Sturzprävention in der Schlafphase

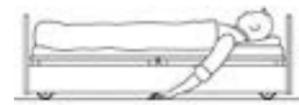

41 cm

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe



80 cm

Optimale Pflegeposition



SafeFree®

Das patentierte Seitensicherungskonzept für Freiheit und Mobilisation

4 Seitensicherungen

1

Im heruntergestellten Zustand bieten die geteilten Seitensicherungen neben einer wohlichen Optik auch einen freien Zugang zum Patienten für die täglichen Pflege, zum Verbandswechsel oder zum Bettenmachen. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

4-stufiger Auszug

Kein Schutz benötigt



4 Vorteile

Barrierefreiheit

Kein Pfosten, kein Mittellückenprotektor



2

Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Dieser „Soft-Schutz“ vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko nachhaltig. Die Seitensicherungen geben Orientierung, ohne den Patienten einzuengen.

Soft-Schutz ohne FEM



Orientierung

statt Freiheitsentziehende Maßnahme (FEM)



3


Der 3/4-Schutz ermöglicht eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch. Durch Anpassung der Betthöhe in Kombination mit der Höhe der Seitensicherung passt sich sentida jeder Patientengröße an.

3/4-Schutz ohne FEM



Mobilisierung

mit Anpassung an die Patientengröße

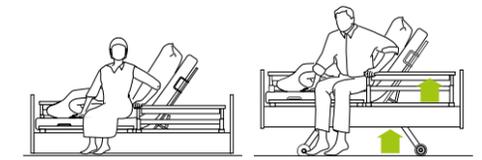

4


Die dritte Auszugsstufe dient zur umfassenden Absicherung des Patienten. In der obersten Position schließen beide Teile der Seitensicherung so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.

Vollschutz bei 12-18 cm Matratzen



Sicherheit

über die neue Norm IEC 60601-2-52 hinaus

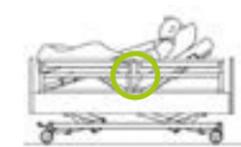

SafeSense*

Sicherheit + Freiheit bei Tag und Nacht durch intelligente Bed-Exit-Sensorik

wissner-bosserhoff - Ihr verlasslicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Manahmen (FEM): Mit SafeSense prasentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlassig bei der Reduzierung von FEM unterstutzt. Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Patient wieder im Bett liegt. SafeSense ist kompatibel mit marktublichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrustbar fur wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.





**Mehr Sicherheit –
weniger FEM****

- Schnellere Reaktionszeit bei Sturzen
- Hoheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Patient wieder im Bett liegt



Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilitat des Patienten



Integriert oder als Nachrust-Kit

- Zubehor-Option fur aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrust-Kit fur elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellosung erhaltlich



Die hospitel Zusatzfunktionen

Im Vergleich zum Standardsortiment bieten die hospitel-Betten zusätzliche Funktionen



Plug & Play

Über beidseitig angebrachte Buchsen zur Aufnahme des Handschalters kann dieser flexibel links oder rechts eingesetzt werden oder notfalls komplett vom Bett entfernt werden, um Verletzungen des Patienten zu vermeiden.



Fixiergurthalter

An der Oberschenkel- und Rückenlehne sowie am Sitzteil angebrachte Fixiergurthalterungen ermöglichen eine gut zugängliche und stabile Lösung zur Anbringung von Fixiergurten.



Schrumpfschlauch

Ein über das Netzkabel gezogener Schrumpfschlauch verhindert ein Verdrehen des Kabels und gewährleistet damit mehr Sicherheit für die Patienten, da Strangulationen mit dem Kabel unmöglich sind.



Wandabweiser 3D

Die 3D-Wandabweisrollen schützen wirksam die Wände - horizontal bei Berührungen während des Manövrierens mit den Betten, vertikal bei der Höhenverstellung.




CPR

Eine vom Kopfteil her auslösbare Notabsenkung der Rückenlehne gewährleistet, dass sich die Liegefläche auch bei stromlosem Betrieb oder in Notsituationen schnell in eine gerade Position bringen lässt.

Abschließbare Bremsen (o. Abb.)

Betten in psychiatrischen Einrichtungen sollen oftmals nicht bewegt werden – weder durch das Personal noch durch den Patienten selbst. Durch die Abschließbarkeit der Bremsen wird dies konsequent sichergestellt (verfügbar für sentida 5/6 und carisma).

für den Einsatz in der postakuten Versorgung oder in psychiatrischen Einrichtungen.

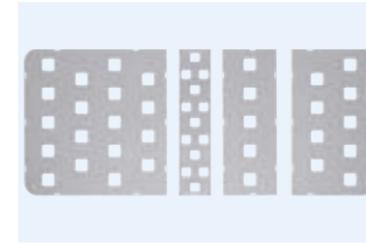

Fixierte Liegefläche

Für besonders aggressive Patienten können die Liegeflächenelemente zusätzlich am Rahmen der Liegefläche fixiert werden, um so ein Entnehmen der Elemente zu verhindern.



Abklappbare Kopf-/Fußteile

Die abklappbaren Kopf- und Fußteile gewährleisten dem Pflegepersonal im Notfall einen besseren Zugang zum Patienten. Darüber hinaus werden „cross infections“ vermieden.



Stoßschutzleiste

Die Seitenwangen mit aufgebrachter Seitenschutzleiste schützen das Bett vor Beschädigungen beim Gebrauch von Liftern oder ähnlichem Zubehör.



Express-Bettverlängerung

Durch die Express-Bettverlängerung lassen sich hospitel-Betten mit geteilten Seitensicherungen flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen (210 oder 220 cm) anpassen.



Seitengitterpolster

Gepolsterte Seitensicherungen schützen sowohl den Patienten als auch das Bett. Die Verletzungsgefahr von unruhigen Patienten, verursacht durch die hochgestellten Seitensicherungen, wird damit wirksam reduziert.

Akku-Pack (o. Abb.)

Durch einen am Motor angebrachten Akku können am Bett auch bei Stromausfall oder während des Transports die elektrischen Verstellfunktionen gesteuert werden. Dies erleichtert die Unabhängigkeit und erhöht somit die Sicherheit.

hospitel Einrichtungsbeispiele

Die Kopf- und Fußteile sowie die Holme der Seitensicherungen sind abgerundet, um eine Verletzungsgefahr unruhiger und sehr agiler Patienten deutlich einzuschränken. Durch den außenliegenden Stollen der Kopf- und Fußteile erhalten diese eine besonders hohe Stabilität.



Design | Farben | Dekore*



Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 für die Herstellung von Medizinprodukten.




Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditierung


Um sich dem Farbkonzept von Krankenhäusern anzupassen, steht für die Betten für Langzeitpflege und Rehabilitation ein erweitertes Farbkonzept mit Unidekoren und Handläufen in „silverline“ Ausführung zur Verfügung.



Maße

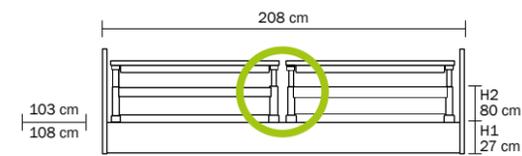


sentida 6 mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos
 Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm
 Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm
 H1 27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

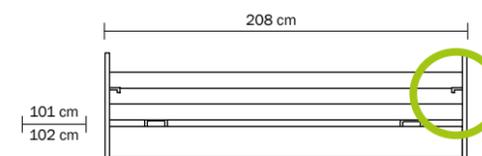


sentida mit durchgehender 2-fach
 Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung

Liegeflächen

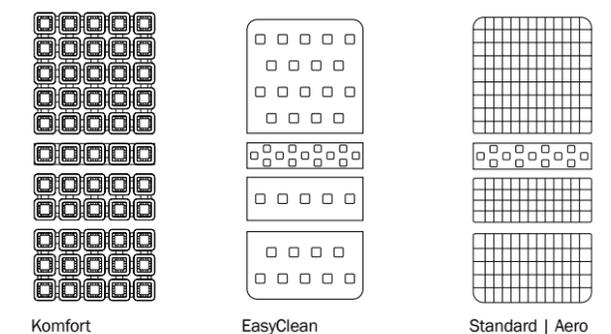


Ausstattungen und Zubehör


Bettverlängerungen

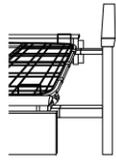


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

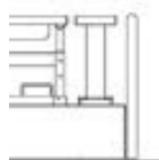


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

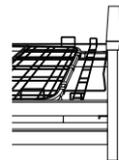

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

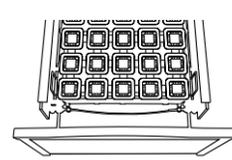


Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

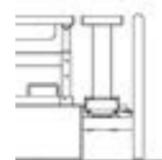

10-0570 / 10-0580
Protector für Bettverlängerung um 20 cm (Option)

Optionen

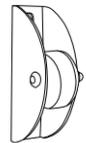


Vertikale Wandabweisrollen



3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend



Auslösung CPR an der Rückenlehne

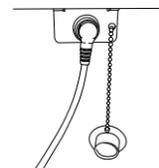

Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten




D-Box mit Leuchtenanschluss für optimales Kabelmanagement




Unterbettleuchte (schaltbar)


Zubehör SafeSense

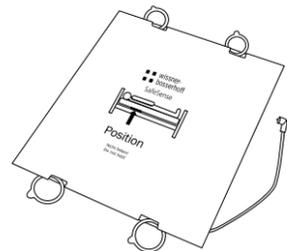


02-000712
Sensormatte 50 x 50 cm für Rückenlehne

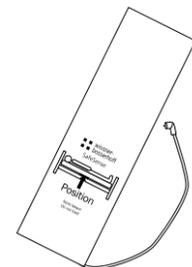


02-000713
Sensormatte 80 x 20 cm für Sitzteil

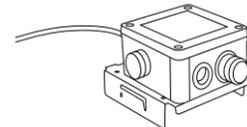

Kabellösung:
04-1544-001
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-004
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku
Funklösung:
04-1544-002
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-003
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku

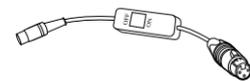


04-1508
Adapterkabel mit passendem Stecker für den Anschluss an die Rufanlage (kundenspezifisch)

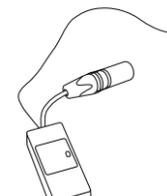


02-000726
Funkempfänger (nur für Funklösung)


Zubehör

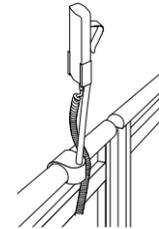


10-0419
Handschalterhalter für geteilte Seitensicherungen
10-0421
Handschalterhalter, kurz

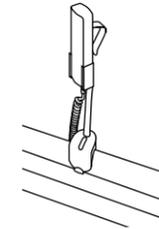


10-0422
Zubehör- und Handschalterhalter für durchgehende Seitensicherungen
10-0421
Handschalterhalter, kurz

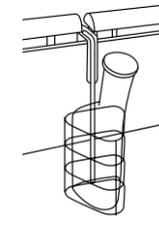


10-0424
Zubehör- und Handschalterhalter zur Anbringung an der Seitenwange
50-0165 Urinflaschenkorb
50-0164 Urinbeutelhalter (ohne Abb.)

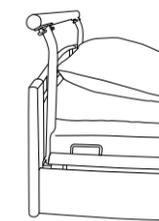

10-0534
Transportgriff EasyMove

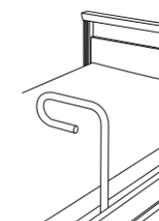


10-0715
Aufstehhilfe für 09-er und 10-er Seitensicherungen, sowie ¾ Seitensicherungen

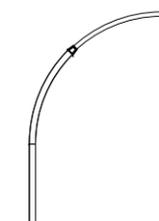

50-0212 Design Halogenleuchte soluna mit 12-V-Trafo
50-0213 Design Halogenleuchte soluna ohne 12-V-Trafo
50-0237 Design LED Leuchte soluna mit Steckernetzteil
50-0550 Design LED Leuchte soluna ohne Steckernetzteil




50-0206
Sturzmatte
B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

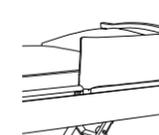


50-0174
Polster für geteilte 10'er Seitensicherungen




50-0338
Polster für 09'er 2-fach Seitensicherungen

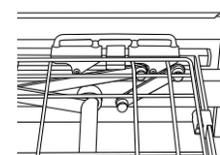


10-0563/10-0533/10-0521
Segufixhalterung
- für Oberschenkellehne
- für die Rückenlehne
- für das Sitzteil

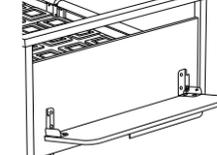

10-0719
Bettzeugablage, kompatibel mit allen Betten

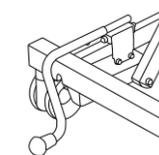

10-0707
kopfseitiger Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)

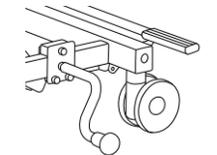

10-0708
seitlicher Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)



Funktionale Eleganz in der Pflege

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6

D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0

Fax: +49(0)2377/784-163

E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de