

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



sentida 5-le | 6-le

Niedrigpflegebetten | light edition





sentida 5-le | 6-le

Wirtschaftliche Niedrigpflegebetten

Bei der light-edition unserer sentida Pflegebetten konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Hochklassige Niedrigpflegebetten mit überzeugender Funktionalität und einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit. Unserem Anspruch an ausgezeichnetes Design sind wir dabei treu geliebt. Überzeugen Sie sich selbst!



sentida 5-le | Das Wohnliche

- Fahrbarkeit in jeder Betthöhe
- Rollen: vollständig verkleidete 50 mm Fahrrollen
- Bremsbarkeit: Achsweiser Pedalbremse mit 2-Rollen-Zentralfeststellung
- Höhenverstellung: 27-80 cm



sentida 6-le | Das Extramobile

- Vollständige Mobilität
- Fahrbarkeit in jeder Betthöhe
- Rollen: 100, 125 oder 150 mm Leichtlaufrollen oder 125 mm Doppellauf- bzw. Designrollen
- Bremsbügel fußseitig mit 4-Rollen-Zentralfeststellung
- Höhenverstellung: 27-80 cm



Das sentida Wohnkonzept



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, warme Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.



Niedrigpflegebett sentida 5-le im Design D10
Abb. links: Design Dx10 mit niedrigem Fußteil



Nachtisch vt 1



Dekor Kirsch Havanna Wandfarbe Akzentfarbe

Die Vorteile sentida 5-le | 6-le



01

Patentiertes SafeFree®- Seitensicherungskonzept

Oft nachgeahmt, nie erreicht – unser Beitrag für weniger Fixierung im Sinne des Werdenfelser Wegs* und des Redufix**-Projektes

- Geteilte Seitensicherung, jeweils in 4 Höhen einstellbar
- Verwendung als Aufstehhilfe zur sicheren Mobilisierung
- Kein Mittelpfosten, keine gefährliche Mittellücke

02

BiNetic-Liegefläche mit doppeltem Rückzug

Echte Dekubitusprävention - mehr als nur eine sogenannte DBfK-Rückenlehne

- Ihr Plus: Reduktion der Beckenkompression sowie der Reibungs- und Scherkräfte durch Beinlehnen-Rückzug um 6 cm
- Rückenlehnenrückzug um 11 cm

03

Automatische Nachtlichtfunktion

Optional kann ein Nachtlicht integriert werden

- Erleichterung der Orientierung bei Nacht
- Mehr Sicherheit für den Bewohner
- Leichte Netzanschlusskontrolle
- Steuerung per Handschalter

04

Design-Handschalter

Verbesserte und erweiterte Funktionalität

- 3 Sicherheitsstufen einstellbar: Pflege, Bewohner- und Sicherheitsmodus
- Mobilisierungsfunktion
- Nachtlichtsteuerung
- Separate Beinlehnenverstellung
- Spielschutz

sentida 6-le

auf Rollen



Fahrbarkeit

- Wahlweise 100 mm Decora, 125/150 mm „Cover Design“ Leichtlaufrollen oder 125 mm „LINEA“ Doppellaufrolle (s. Abb.)
- Problemloser Transport auch außerhalb des Bewohnerzimmers
- Zentraler Bremsbügel (fußseitig) mit integriertem Richtungsfeststeller
- 4-Rollen-Zentralfeststellung

Höhenverstellung

- 27-80 cm mit 100 mm Leichtlaufrollen
- 29,5-82,5 cm mit 125 mm Leichtlaufrollen
- 28-81 cm mit 125 mm Doppellauf- /Designrollen
- 32-85 cm mit 150 mm Leichtlaufrollen

Interesse an weiteren Features?

- 3-Stopp-Strategie
- Komfortsitz-Automatik
- Prophylaxe-Automatik



SafeSense®*

Sicherheit + Freiheit bei Tag und Nacht durch intelligente Bed-Exit-Sensorik

wissner-bosserhoff - Ihr verllässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FEM unterstützt. Es ist mit einer Nachlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.



Mehr Sicherheit –
weniger FEM**

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt




Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners



Integriert oder als Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

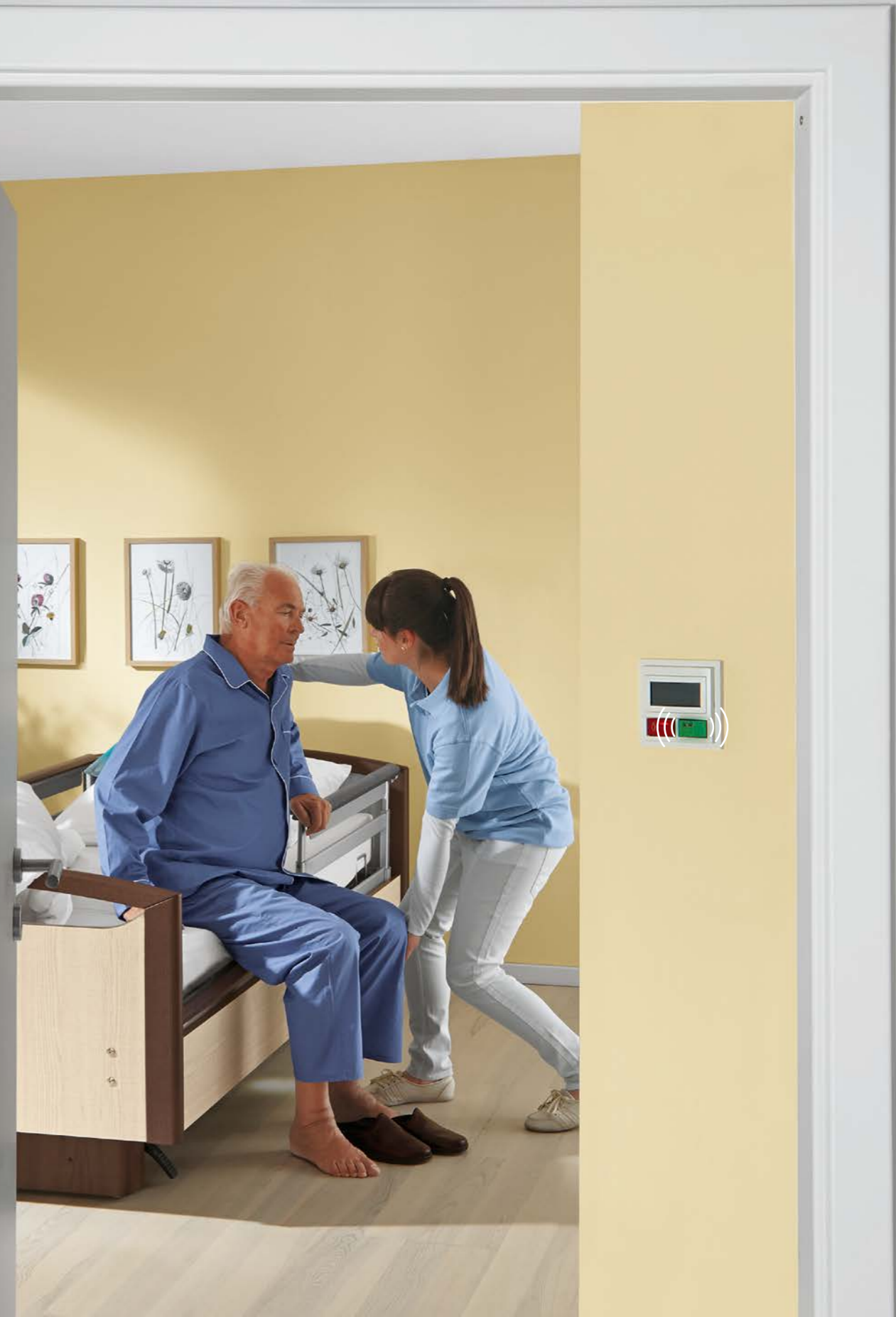

Weitere Informationen zum SafeSense® finden Sie auf Seite 22.

SafeFree® – das patentierte Seitensicherungskonzept

Freiheit erhalten ganz im Sinne des Werdenfelser Weges*

4 Seitensicherungen

1

Im heruntergestellten Zustand bieten die geteilten Seitensicherungen neben einer wohnlichen Optik auch einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflege, zum Verbandwechsel oder zum Bettenmachen. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

4-stufiger Auszug


Kein Schutz benötigt



4 Vorteile

Barrierefreiheit

Kein Pfosten, kein Mittellückenprotector

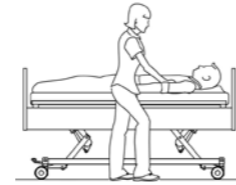

2

Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Dieser „Soft-Schutz“ vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko nachhaltig. Die Seitensicherungen geben Orientierung, ohne den Bewohner einzuengen.

Soft-Schutz

keine FEM**



Orientierung

statt Freiheitsentziehende Maßnahme (FEM)



3

Der 3/4-Schutz ermöglicht eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch. Durch Anpassung der Betthöhe in Kombination mit der Höhe der Seitensicherung passt sich sentida jeder Bewohnergröße an.


3/4-Schutz

keine FEM**



Mobilisierung

mit Anpassung an die Bewohnergröße

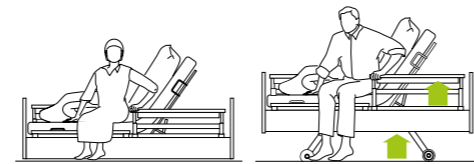

4

Die dritte Auszugsstufe dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. In der obersten Position schließen beide Teile der Seitensicherung so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.


Vollschutz

bei 12-18 cm Matratzen



Sicherheit

über die neue Norm IEC 60601-2-52 hinaus

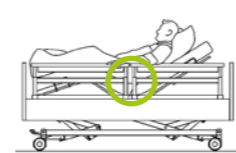


Mobilisierung mit richtigem Abstützwinkel je nach Bewohnergröße




Pflege mit 4 geteilten Seitensicherungen = voller Zugriff

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege (Abb. 1)
- Flexibler beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf (Abb. 2)
- Flexible Bettverwendung für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

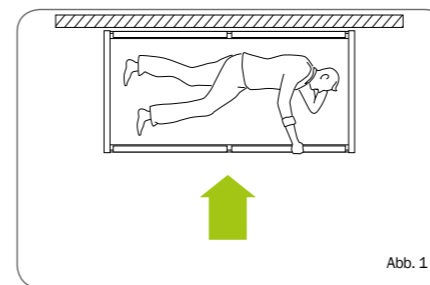


Standardpflege – einseitiger Pflegezugriff ausreichend

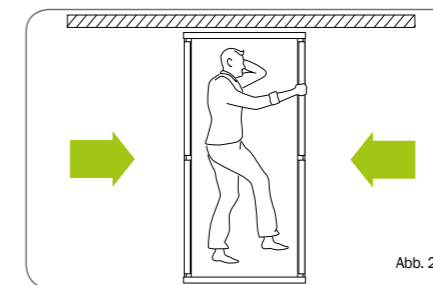

Erhöhter Pflegebedarf – beidseitiger Pflegezugriff notwendig

Mehr Sicherheit durch kleine Mittellücke* < 60 mm

- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d. h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protectors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM**

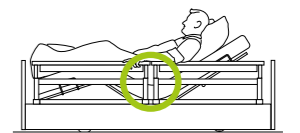

*Mittellücke = Abstand zwischen geteilten Seitensicherungen

**Information des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel & Medizinprodukte) an die Fachkreise vom 08.07.2004 (Ref.-Nr. 913/0704)


BiNetic-Liegefläche mit doppeltem Rückzug

zur effektiven Dekubitusprävention


Liegeflächen-Ergonomie

Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche trägt zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung bei. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an den Erkenntnissen der Anthropometrie, d. h. an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse von Prof. Eigler wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Hals-


wirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte Bettverlängerung: Mit der werkzeuglosen Express-Bettverlängerung kann die Liegefläche temporär oder mit Verlängerungseinsatz auch permanent auf 220 cm verlängert werden und verhindert so ein Anstoßen der Beine am Fußteil.

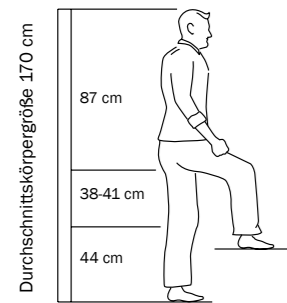

Anthropometrie nach Prof. Eigler*

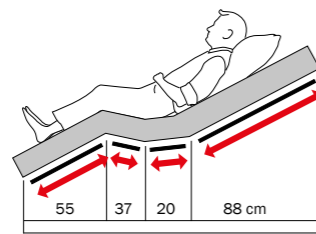

BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

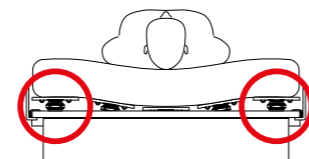


Komfortliegefläche mit 55 Federelementen

Liegeflächen-Modularität

Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

- 01 Die Drahtgitterliegefläche **Aero** sorgt für eine gute Durchlüftung.
- 02 Die Kunststoffauflagen der **EasyClean-Liegefläche** sind besonders leicht zu reinigen.
- 03 Die **Komfort-Liegefläche** mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.

Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

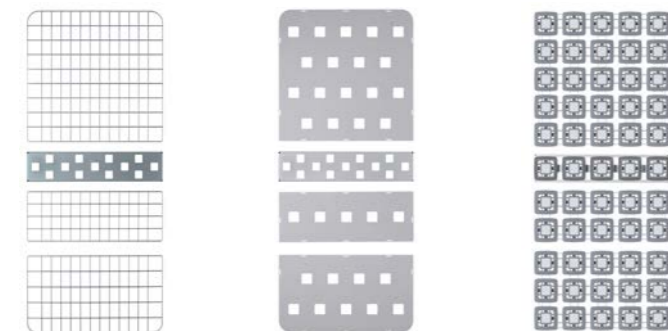

01

02

03



Detail Komfort-Liegefläche

Wirkung des doppelten Rückzugs nachgewiesen


wissner-bosserhoff verfolgt bereits seit vielen Jahren ein praktikables Konzept zur Reduzierung des Dekubitusrisikos: Den doppelten Rückzug als Bestandteil der BiNetic-Liegefläche. Beim doppelten Rückzug wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert.

Inzwischen liegen auch Ergebnisse von Druckmessungen (Thermografien) vor, aus denen deutlich zu erkennen ist, dass der Druckbelastung beim doppelten Rückzug niedriger ist als beim einfachen Rückzug und deutlich niedriger ist als bei einer Standardliegefläche.

Standard-Liegefläche ohne Entlastung




Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

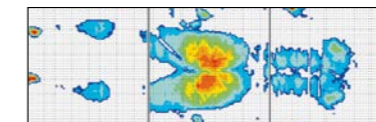


Thermografie einer Standard-Liegefläche

WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung

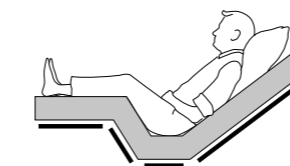

6 cm ← → 11 cm
Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

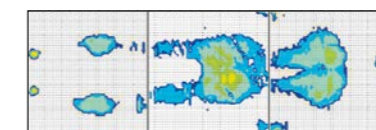

Thermografie der BiNetic-Liegefläche

Der doppelte Rückzug ist nicht als alleinige Dekubitusprävention zu sehen; er kann aber die vorhandenen Möglichkeiten gut unterstützen und zeigt vor allem, dass wir heute alle uns

zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten einsetzen sollten, um die Prävention zu verbessern.

Bis zu
1,5
Millionen

Menschen leiden an Dekubitus: Allein in Deutschland geht man von ca. 750.000 bis 1,5 Millionen Dekubitus-Patienten aus. Vor allem immobile, kranke und ältere Menschen sind betroffen. Die Kosten zur Behandlung des Dekubitus in Deutschland betragen jährlich 1 bis 4 Milliarden Euro. Aufgrund der steigenden Bevölkerungsalterung sowie der Zunahme chronischer Erkrankungen werden die Fälle von Dekubitus Erkrankungen weiter zunehmen. Gemäß dem Gesundheitsbericht des Bundes (Heft 12, Dekubitus, Dezember 2002) können durch entsprechende Prophylaxemaßnahmen und eine optimierte Therapie die Hälfte dieser Kosten eingespart werden.

Quelle: www.deutsche-dekubitusliga.de/das-problem



Doppelter Rückzug =
17cm
mehr Platz im Bett!

3 Bettlängen

ohne Mittellücke > 318 mm und ohne Mittelpfosten

Alle Pflegebetten von wissner-bosserhoff verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung. Durch die **Express-Bettverlängerung** (s. Abb. unten) lässt sich sentida mit **geteilten Seitensicherungen** flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen anpassen. Dabei werden in jeder Konfiguration die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 eingehalten.



Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)


200 cm

Bettlänge 200 cm:
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne große Mittellücke* und ohne Protektor




220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet

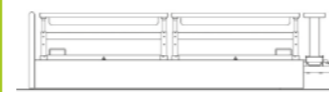

210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehöre und ohne Lücke > 318 mm**

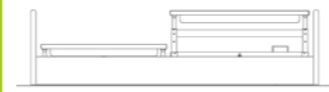


Design-Handschalter

intuitiv bedienbar

Der Handschalter besticht auf den ersten Blick durch seine Übersichtlichkeit und ergonomische Formgebung: weniger Tasten und große Symbole sorgen dafür, dass die Bedienung intuitiv erlernbar ist.

Dank der Pre-Selection (Vorauswahlfunktion) ist der Handschalter erstfehlersicher – eine Funktionsauslösung durch versehentliches Drücken einer Taste ist ausgeschlossen.

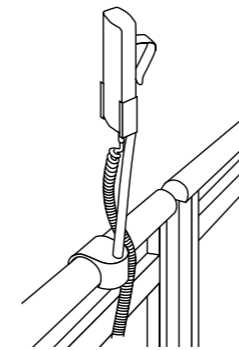

Jederzeit gute Erreichbarkeit für Bewohner und Personal (Zubehör Handschalterhalter, Mod. 10-0419 und 10-0421).



Rückenlehnenverstellung

Autokontur

Höhenverstellung

Auf

Ab

Interesse an weiteren Features?

- 3-Stopp-Strategie
- Komfortsitz-Automatik
- Prophylaxe-Automatik



3 Sicherheitsstufen

In den Handschalter integriert ist die Sperrfunktion auf seiner Rückseite, ein Suchen und Bücken nach einer am Liegeflächenholm angebrachten Sperrbox entfällt somit. Über einen magnetfreien Schlüssel werden drei Handschaltermodi eingestellt:

Pflegemodus:

Alle Auswahl-tasten sind freigegeben.

Sperrmodus:

Alle Funktionen des Handschalters sind gesperrt.

Bewohnermodus:

Die oberen drei Auswahl-tasten stehen dem Bewohner zur Verfügung.



Pflegemodus



Sperrmodus



Bewohnermodus



Magnetfreier Schlüssel für 3 Sicherheitsstufen

*Mittellücke (Abstand zwischen den geteilten Seitensicherungen) < 60 mm
**Lücken zwischen geteilten Seitensicherungen sowie zwischen Seitensicherungen und Kopf- bzw. Fußteilen < 60 mm

Effektives Kabelmanagement

D-Box versorgt Bett und Leseleuchte


Die praktische D-Box macht dem lästigen Kabelgewirr ein Ende. Innen am Kopfteil angebracht nimmt die D-Box die beiden Kabel des Bettes und der Leuchte auf. Somit führt nur noch ein Kabel zur Steckdose.



3 Kabel – eine Lösung – viele Vorteile

- Es muss nur ein Kabel entfernt werden, wenn das Bett bewegt wird.
- Keine Verwechslungsgefahr bzgl. des Kabels beim Herausziehen aus der Steckdose.
- Unabhängig vom Motor, daher guter Zugang zu den Anschlüssen in jeder Bettposition.
- Einsetzbar für Halogen- und LED-Leuchten.

LED + Halogen

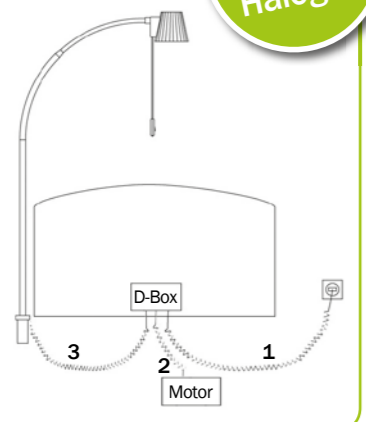


Antimikrobielle Beschichtung

Keimfreie* Oberflächen in kürzester Zeit

In Pflegeeinrichtungen ist ein erhöhtes Aufkommen von MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) und anderen Erregern beobachtbar, die durch gängige Hygienemaßnahmen kaum oder nur sehr aufwändig verhindert bzw. vernichtet werden können.

wissner-bosserhoff bietet daher nun erstmalig in Europa eine antimikrobielle Beschichtung für Pflegebetten an. Die im Pflegealltag durch Bewohner und Pflegepersonal am häufigsten berührten Bettpartien werden durch die Beschichtung imprägniert, was effektiv ein Entstehen und die Weiterverbreitung der multiresistenten Viren verhindert. Für den Menschen unbedenklich, werden kontinuierlich Ionen gebildet, die die Stoffwechselsysteme der schädlichen Mikroorganismen angreifen.

Den Praxistest hat die antimikrobielle Beschichtung erfolgreich bestanden: Der Wirkstoff auf ionischer Basis ist hochwirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Algen. Selbst wenn zusätzlich marktübliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden wird die Wirkung nicht beeinträchtigt.

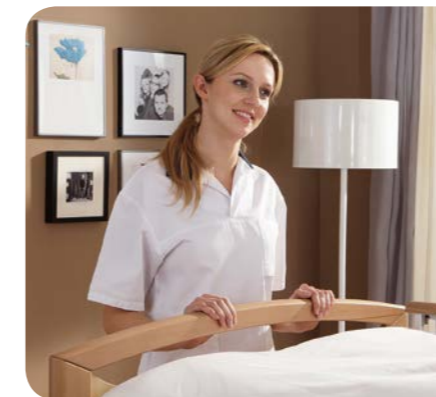

Die wibo-Wirkformel

Der antimikrobielle Schutzfilm wirkt nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren (z. B. HIV, Grippe usw.), Pilze (z. B. Schwarzschilder) und Algen. Er ist also viel effizienter als normale Wischdesinfektionen und behält seine volle Wirksamkeit über den Produktlebenszyklus hinaus.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ansiedlung und Übertragung von Keimen wird reduziert
- Reduzierung der Ansteckungsgefahr durch gehemmtetes Keimwachstum
- Zahl der Infektionen in Pflegeheimen wird gesenkt
- Antibiotika-Resistenzen werden reduziert
- Risiko der Beschädigung durch Reinigungsmittel verringert sich

Eine dauerhafte Keimansammlung und -vermehrung auf den am häufigsten berührten Pflegebett- und Nachttischoberflächen wird damit wirksam verhindert.

MRSA sind die häufigsten multiresistenten Erreger nosokomialer Infektionen in Europa. Schätzungen zeigen, dass jährlich etwa

170.000

MRSA-Infektionen die europäischen Gesundheitssysteme mit mehr als

5.000

Todesfällen, mehr als einer Million zusätzlichen Hospitalisationstagen und Mehrkosten von circa 380 Millionen Euro belasten.

Quelle: <http://www.aerzteblatt.de/archiv/112574/Methicillin-resistenter-Staphylococcus-aureus-in-Deutschland-Epidemiologie>

Studien zur Wirksamkeit des antimikrobiellen Additivs in den Materialien der Pflegebetten und -nachttische zeigen, dass es im Durchschnitt 99,9% der E.coli- und Micrococcus luteus-Bakterien sowie 98,4% der Staphylococcus aureus-Bakterien innerhalb von

180
Minuten

eliminiert.


Quelle: Studien der SteriOne GmbH & Co. KG, Berlin

*Keimfrei bedeutet für uns, dass mehr als 95% der häufigsten Keimansiedlungen eliminiert werden.

Design | Kopf-/Fußteile



Farben | Dekore*

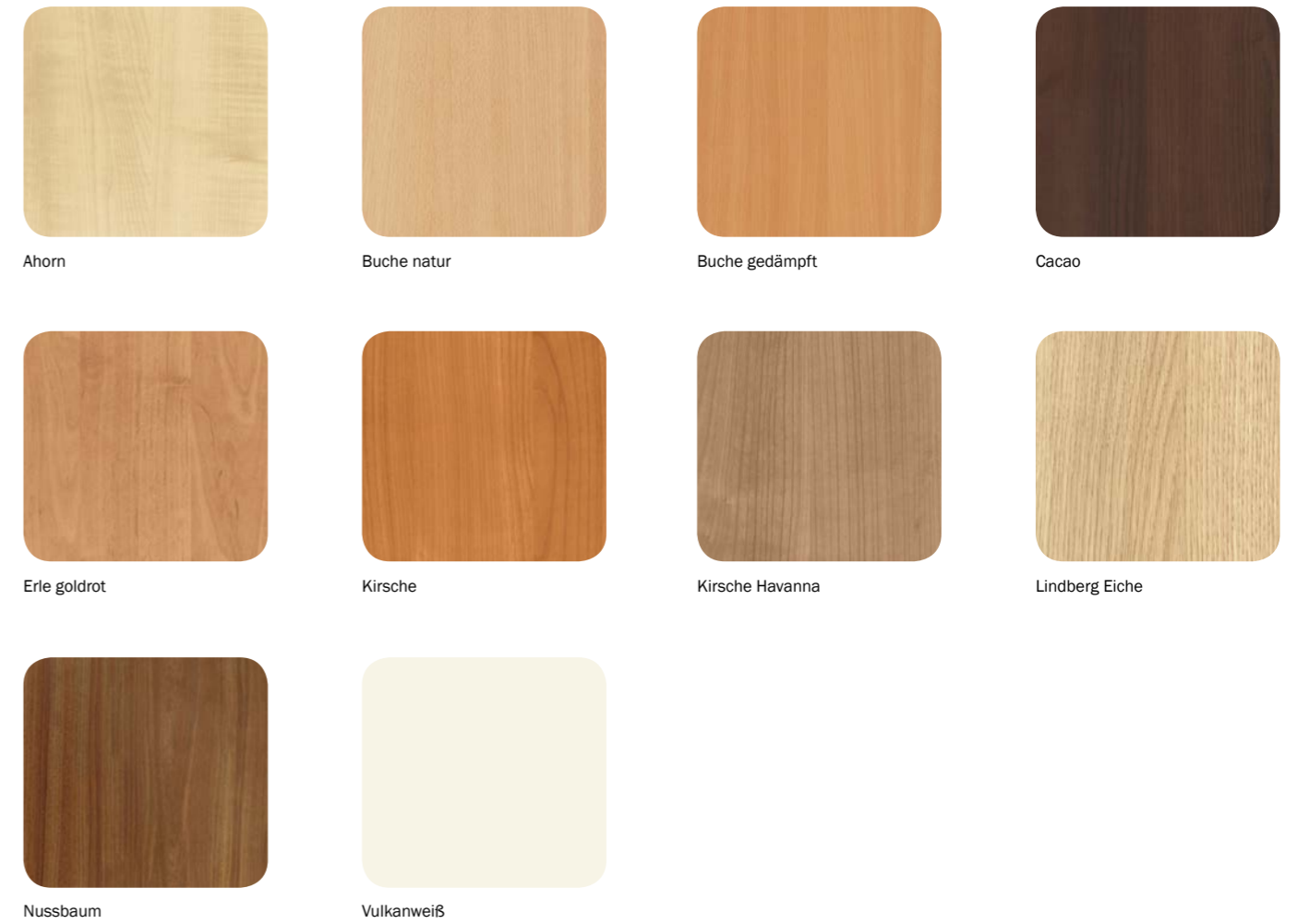


Farbkombination memoriana




Ausstattungen und Zubehör

Maße

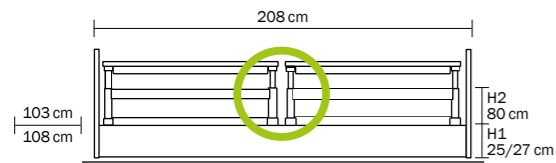


sentida mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos
 Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm
 Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm
 H1 25/27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

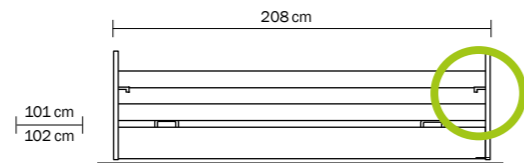


sentida mit durchgehender 2-fach
 Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung


Liegeflächen

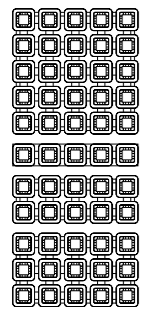

Komfort

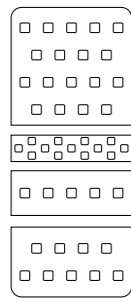


EasyClean

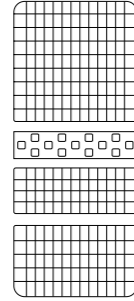


Standard | Aero


Bettverlängerungen

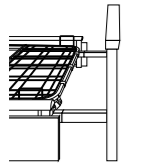


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

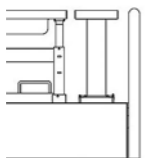


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

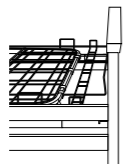

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

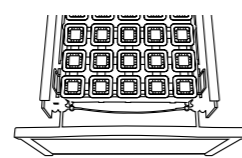


Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

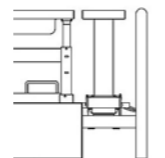

10-0570 / 10-0580
 Protektor für Bettverlängerung um 20cm (Option)


Optionen

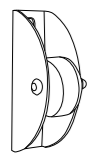

Vertikale Wandabweisrollen



3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend

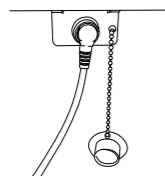

Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten




D-Box mit Halogenleuchtenanschluss für optimales Kabelmanagement




Unterbettleuchte (schaltbar)


Zubehör

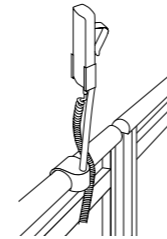


10-0419
 Handschalterhalter für geteilte Seitensicherungen
 10-0421
 Handschalterhalter, kurz

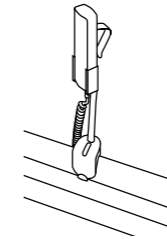


10-0422
 Zubehör- und Handschalterhalter für durchgehende Seitensicherungen
 10-0421
 Handschalterhalter, kurz

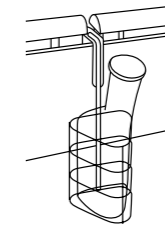


10-0424
 Zubehör- und Handschalterhalter zur Anbringung an der Seitenwange
 50-0164 Urinbeutelhalter (ohne Abb.)

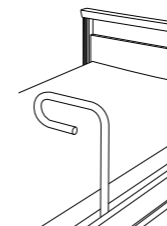


10-0715
 Aufstehhilfe für 09er- und 3/4-Seitensicherungen

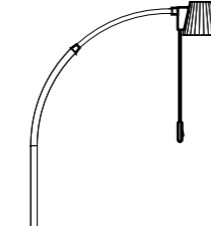


50-0212 Design Halogenleuchte soluna mit 12-V-Trafo
 50-0213 Design Halogenleuchte soluna ohne 12-V-Trafo
 50-0237 Design LED Leuchte soluna mit Steckernetzteil
 50-0550 Design LED Leuchte soluna ohne Steckernetzteil

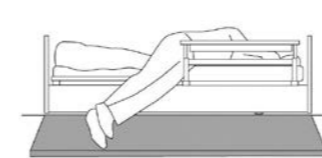


50-0206
 Sturzmatte B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

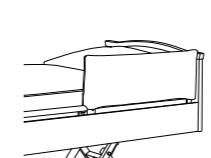


50-0174
 Polster für geteilte 10'er Seitensicherungen

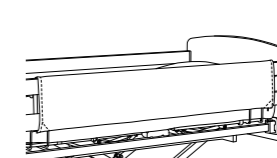


50-0338
 Polster für 09'er 2-fach Seitensicherungen

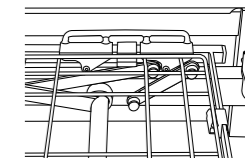


10-0563/10-0533/10-0521
 Segifixhalterung - für Oberschenkellehne - für die Rückenlehne - für das Sitzteil

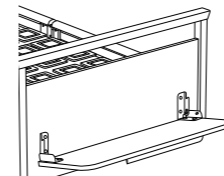


10-0719
 Bettzeugablage, kompatibel mit allen Betten

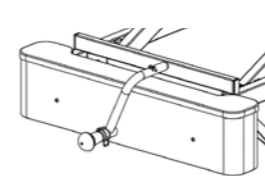

10-0612
 kopfseitiger Wandabstandshalter kurz, für sentida 5-le

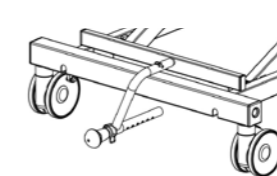


10-0612
 kopfseitiger Wandabstandshalter teleskopierbar, für sentida 6-le

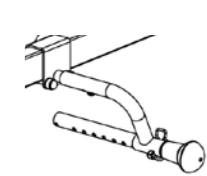

10-0613
 seitlicher Wandabstandshalter teleskopierbar, für sentida 5-le/6-le


Zubehör | SafeSense® Bed-Exit-System

SafeSense® Sensormatte

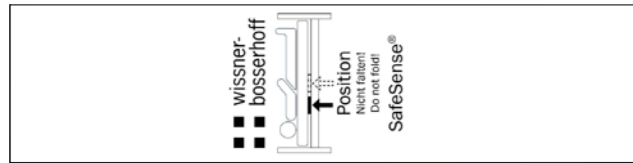

02-000781
SafeSense® Sensormatte
80 x 20 cm


SafeSense® Bed-Exit-Box

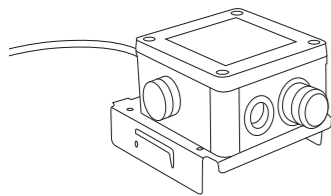

Kabellösung (SafeSense® 1):
04-1544-001
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-004
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku

Funklösung (SafeSense® 2):
04-1544-002
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-003
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku


SafeSense® Anschluss-Kit

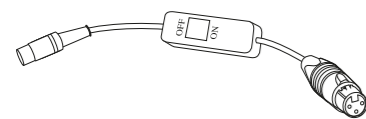

04-1508
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und
passendem Stecker für den Anschluss an
die Rufanlage (kundenspezifisch) für Kabel-
und Funklösung (SafeSense® 1 und 2)



04-1608
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter;
mit passendem Stecker für den Anschluss
an die Rufanlage (kundenspezifisch)
für Kabel- und Funklösung

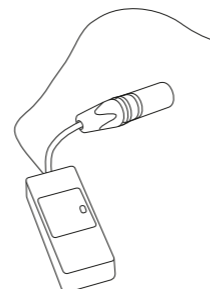

02-000726
Funkempfänger
nur für Funklösung
(SafeSense® 2)

Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 für die Herstellung von Medizinprodukten.



ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012 ISO 14001:2004 ISO 50001:2011



Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditierung



CB-Zertifikat Gutachten zu Seitensicherungen Prüfzeugnis zur antimikrobiellen Beschichtung

Ausgezeichnetes Design

wissner-bosserhoff widmet dem Design große Aufmerksamkeit. Die Produkte verbindet nicht nur Funktionalität und hochwertige Ausführung, sondern auch Design auf höchstem Niveau. Sie zeichnen sich sowohl durch hohe Funktionalität und wohnliche Gestaltung als auch durch angenehme Bedienbarkeit und Ergonomie aus. Dafür hat sentida mehrfach angesehene Design-Auszeichnungen erhalten und zählt damit zu den bedeutendsten Pflegebettserien im internationalen Maßstab.





■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.de

