


Essenza 300

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

ESSENZA 300 MIT SCHWENKBAREN SEITENSICHERUNGEN

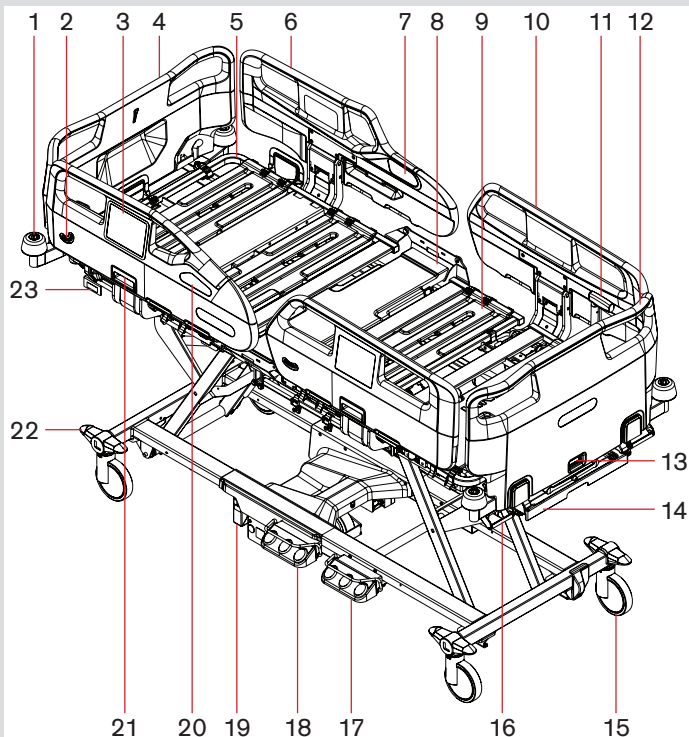

1. Wandabweisrolle
2. Winkelanzeige
3. Seitengitterbedieneinheit
4. Kopfteil
5. Rückenlehne
6. Kopfseitige schwenkbaren Seitensicherung
7. Patienten-Bedieneinheit
8. Sitzfläche
9. Oberschenkelteil
10. Fußseitige schwenkbaren Seitensicherung
11. Mobi-Lift-Griff
12. Fußteil
13. Sicherheitsverriegelung Fußteil
14. Bettzeugablage (auch für Pflegebedienelement (Supervisor))
15. Rolle
16. Bettverlängerungsgriff (Erweiterte Bettverlängerung)
17. Fußschalter Höhenverstellung
18. Fußschalter seitliche Schwenkung
19. EasyDrive
20. Mobi-Pad
21. Entriegelungsmechanismus Seitengitter
22. Richtungsfeststeller
23. CPR-Auslösung für Notentriegelung der Rückenlehne


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

SCHWENKBAREN SEITENSICHERUNGEN

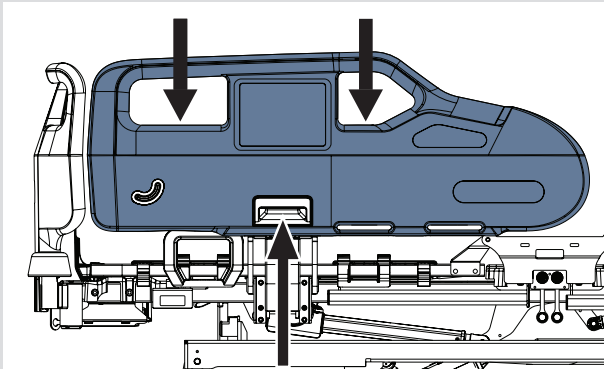


Seitensicherung hochziehen:

1. Die Seitensicherung am Seitensicherungsgriff greifen.
2. Die Seitensicherung hochziehen, bis sie einrastet. Es ist ein deutliches „Klicken“ zu hören
3. Die Seitensicherung vor und zurück schieben, um sicherzustellen, dass die Seitensicherung in der oberen Position fixiert ist!

Seitensicherung herunterlassen:

1. Die Seitensicherung am Seitensicherungsgriff greifen.
2. Die Seitensicherung entriegeln, indem am Entriegelungsgriff gezogen wird.
3. Die Seitensicherung langsam herunterklappen.

CPR-NOTFALLPOSITION

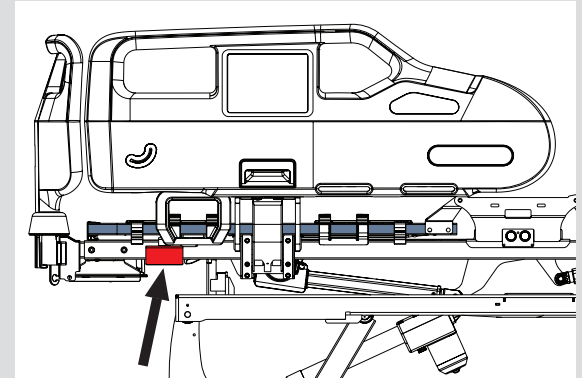

CPR-Notfallposition manuell einstellen:

1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
2. Die Rückenlehne nach unten schieben.




Essenza 300

Klinikbett

D9R001EZ3-0106_00

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

TELESKOP-SEITENSICHERUNGEN

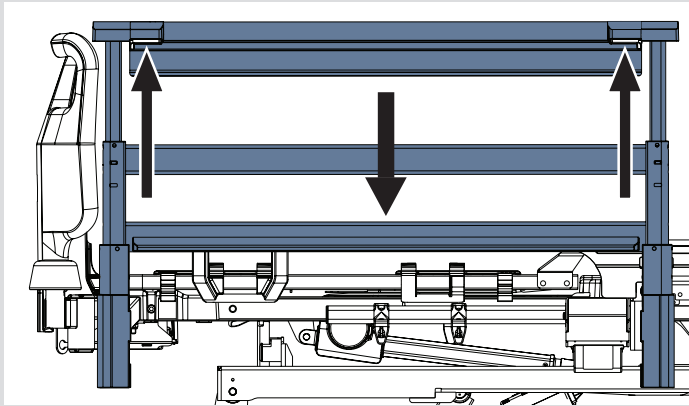


Seitensicherung hochziehen:

1. Beide Entriegelungsmechanismen der Seitensicherungen festhalten und die roten Tasten an beiden oberen Enden der ausgewählten Teleskop-Seitensicherung drücken.
2. Die Teleskop-Seitensicherung nach oben in die gewünschte Position ziehen.
Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch.

Seitensicherung herunterlassen:

1. Beide Entriegelungsmechanismen der Seitensicherungen festhalten und die roten Tasten an beiden oberen Enden der ausgewählten Teleskop-Seitensicherung drücken.
2. Die Teleskop-Seitensicherung in die gewünschte Position herunterlassen.
Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch.

CPR-NOTFALLPOSITION

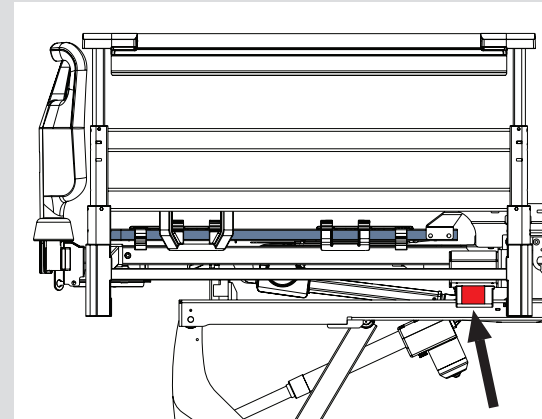

CPR-Notfallposition manuell einstellen:

1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
2. Die Rückenlehne nach unten schieben.


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

3/4-SEITENSICHERUNGEN

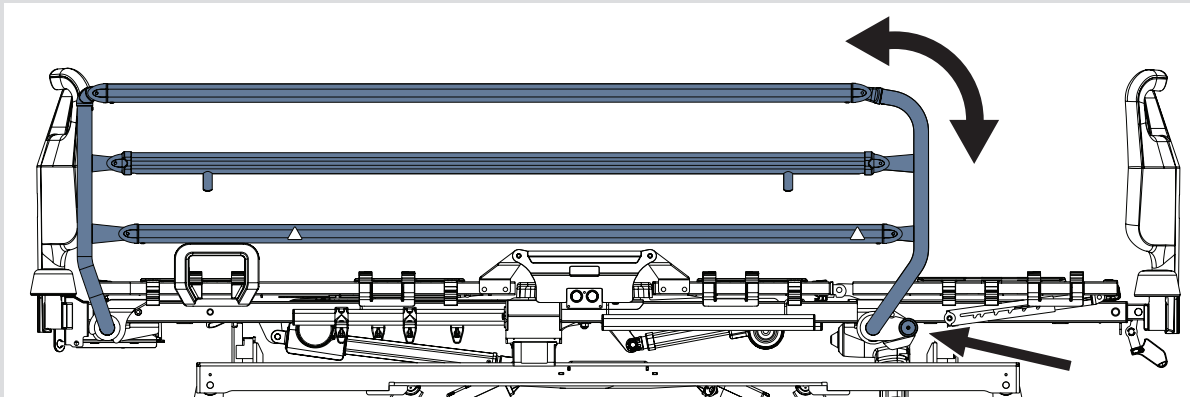

CPR-NOTFALL- POSITION

CPR-Notfallposition manuell einstellen:


1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
2. Die Rückenlehne nach unten schieben.

Seitensicherung hochziehen:

1. Eine obere Seitensicherungsstange greifen und die Seitensicherung nach oben schieben. Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch. Es ist ein deutliches „Klicken“ zu hören.
2. Die Seitensicherung in Richtung Kopfende und Fußende schieben, um sicherzustellen, dass diese fixiert ist.

Seitensicherung herunterklappen:

1. Die Seitensicherung entriegeln, indem der Hebel des Entriegelungsmechanismus für die Seitensicherung herausgezogen wird.
2. Die Seitensicherung langsam herunterklappen. Die Seitensicherung nicht herunterfallen lassen, wenn sie entriegelt ist!

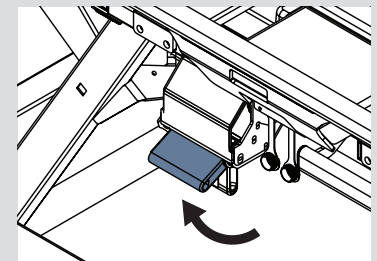


Essenza 300

Klinikbett

D9R001EZ3-0106_00

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

POSITIONIERUNG DES BETTES

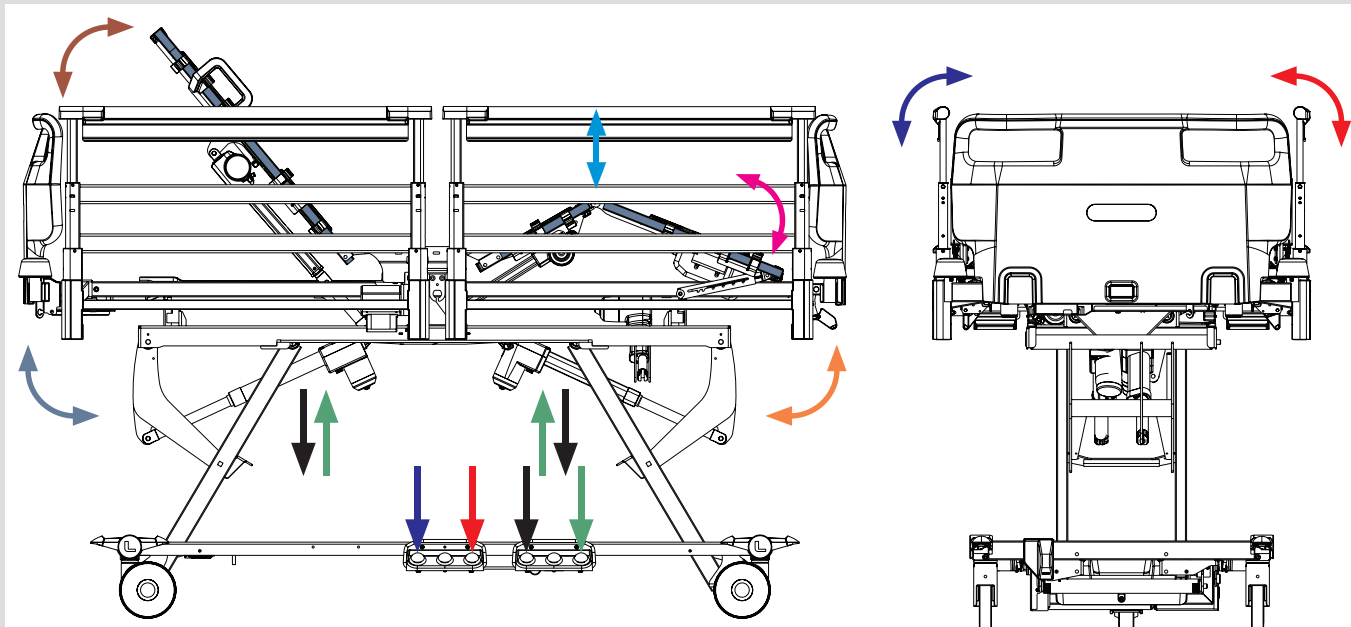

- VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE
- VERSTELLEN DES OBERSCHENKELTEILS
- VERSTELLEN DER UNTERSCHENKELAUFLAGE

- VERSTELLEN DER BETTHÖHE (AUF)
- VERSTELLEN DER BETTHÖHE (AB)
- TRENDLENBURG-LAGERUNG

- ANTI-TRENDELBURG-LAGERUNG
- SEITLICHE SCHWENKUNG RECHTS
- SEITLICHE SCHWENKUNG LINKS


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

PFLEGEBEDIENEINHEIT (SUPERVISOR)

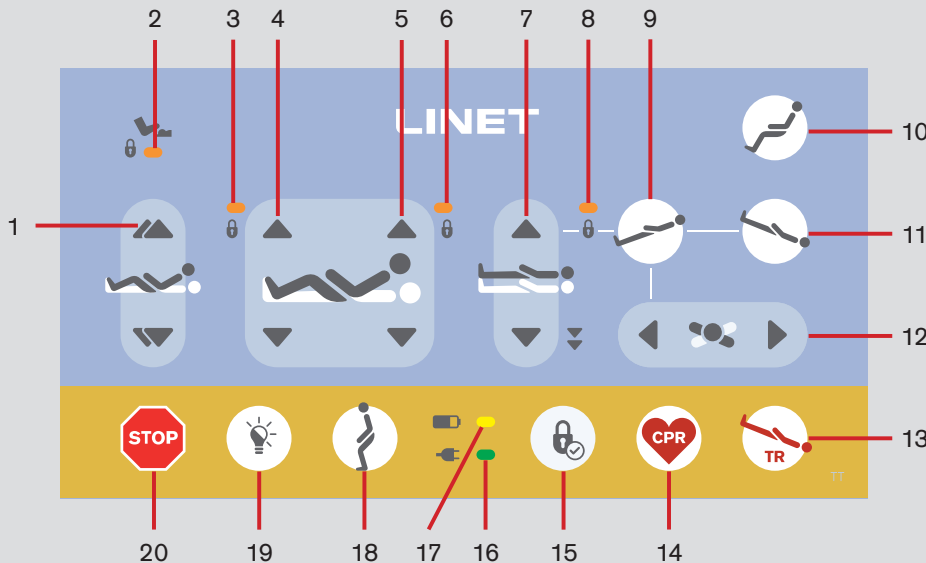

1. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
2. LED-Anzeige für die Verriegelung des Fußschalters (EIN – verriegelt)
3. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN – verriegelt)


4. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
5. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)
6. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN – verriegelt)
7. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position)
8. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung / der seitlichen Schwenkung / der Trendelenburg-Lagerung (EIN – verriegelt)
9. Taste für Anti-Trendelenburg-Lagerung
10. Taste für Herzbettlagerung
11. Taste für Trendelenburg-Lagerung
12. Tasten für seitliche Schwenkung (rechts/links)
13. Taste für Notfall-Trendelenburg-Lagerung/ CPR
14. Taste für CPR-Notfallposition
15. Verriegelungstaste
16. LED-Anzeige für Netzstrom
17. LED-Anzeige für Akku-Ladezustand
18. Taste für Mobilisierungsposition
19. Taste zur Steuerung der Bettbeleuchtung
20. Zentrale STOPP-Taste

Essenza 300

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

SEITENSICHERUNGSBEDIENEINHEIT

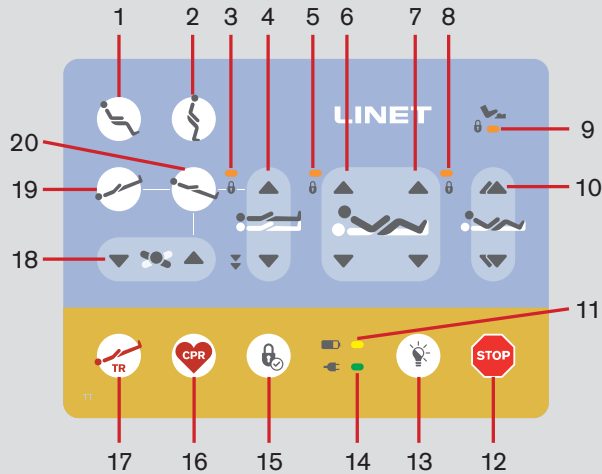

1. Taste für Herzbettlagerung
2. Taste für Mobilisierungsposition
3. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung / der seitlichen Schwenkung / der Trendelenburg-Lagerung / der Anti-Trendelenburg-Lagerung (EIN – verriegelt)
4. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position)
5. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN – verriegelt)
6. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)
7. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
8. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN – verriegelt)
9. LED-Anzeige für die Verriegelung des Fußschalters (EIN – verriegelt)
10. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
11. LED-Anzeige für Akku-Ladezustand
12. Zentrale STOPP-Taste
13. Taste zur Steuerung der Bettbeleuchtung
14. LED-Anzeige für Netzstrom
15. Verriegelungstaste
16. Taste für CPR-Notfallposition
17. Taste für Notfall-Trendelenburg-Lagerung/CPR
18. Tasten für seitliche Schwenkung (rechts/links)
19. Taste für Trendelenburg-Lagerung
20. Taste für Anti-Trendelenburg-Lagerung


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett


Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

HANDBEDIENEINHEIT

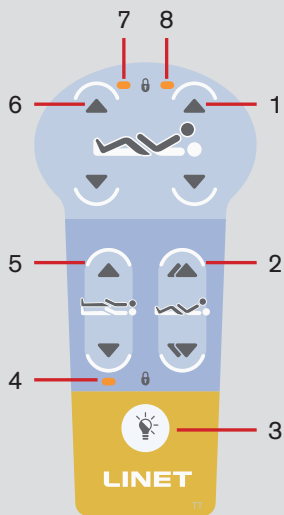

1. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)
2. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
3. Taste für die Taschenlampe
4. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung (EIN – verriegelt)
5. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
6. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
7. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN – verriegelt)
8. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN – verriegelt)

PATIENTEN-BEDIENEINHEIT

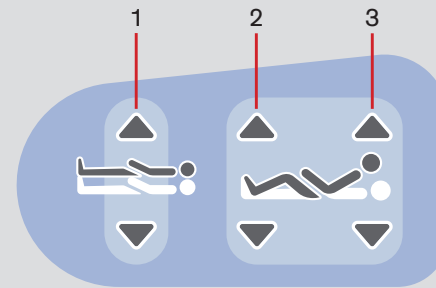


1. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
2. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
3. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)

Essenza 300

Klinikbett


Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

FUSSSCHALTER BETHÖHENVERSTELLUNG

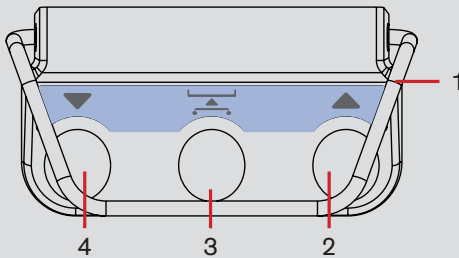


1. Schutzrahmen gegen unerwünschte Aktivierung
2. Pedal anheben (Liegefläche nach oben)
3. Pedal für Untersuchungsposition
4. Pedal absenken (Liegefläche nach unten)

FUSSSCHALTER SEITLICHE SCHWENKUNG

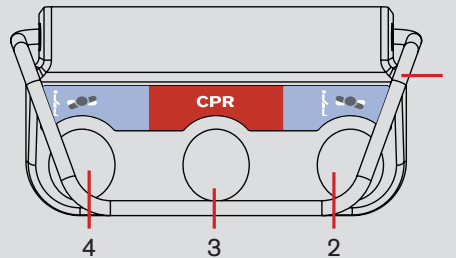

1. Schutzrahmen gegen unerwünschte Aktivierung
2. Pedal für Rechtsneigung
3. Pedal für CPR-Notfallposition
4. Pedal für Linksneigung

MOBI-PAD

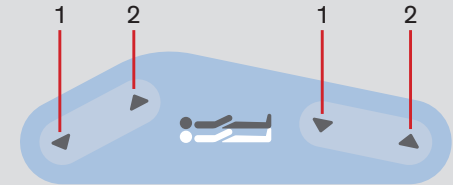

1. Liegefläche Ab (+ niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
2. Liegefläche Auf

Essenza 300



D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

ROLLENSTEUERUNG

EASYDRIVE

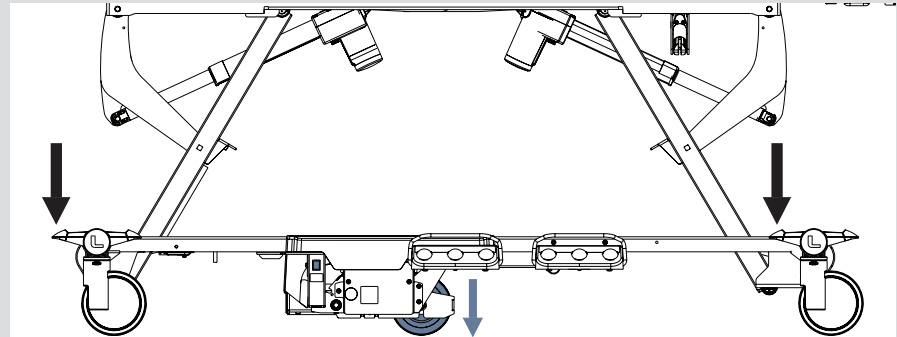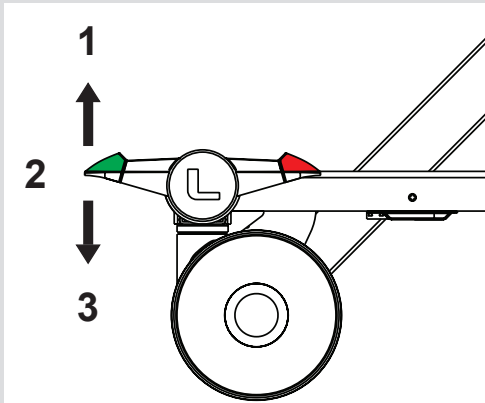

Pedalfarbe	Obere Position (1)	Mittlere Position (2)	Untere Position (3)
GRÜN	GEBREMST	UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNG	LENKUNG / 5. ROLLE / EasyDrive
ROT	LENKUNG / 5. ROLLE / EasyDrive	UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNG	GEBREMST

So bereiten Sie das EasyDrive-Systems auf die Nutzung vor:
Drücken Sie das grüne Fahrpedal in die untere Stellung.



So fahren Sie das Rad von EasyDrive ein:
Lassen Sie alle Bremspedale und Fahrpedale in der Mittelstellung.

Essenza 300

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

EASYDRIVE-BEDIENEINHEIT

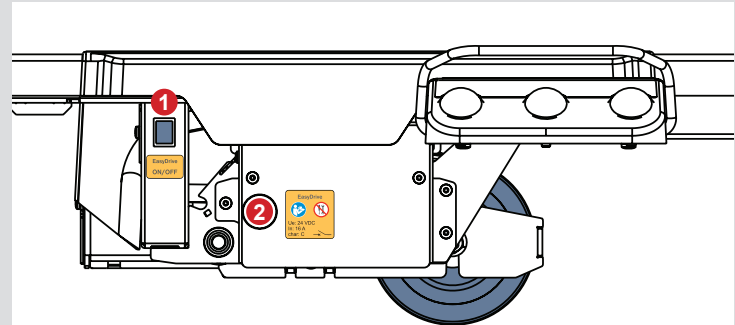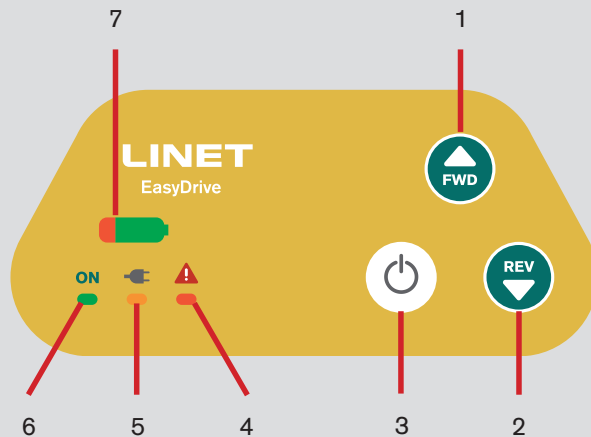

1. EasyDrive-Netzschalter

2. Schutzschalter der EasyDrive-Akkubox

1. Taste VORWÄRTS
2. Taste RÜCKWÄRTS
3. Taste EIN/AUS (Aktivierung über die Bedieneinheit)
4. LED-Störungsanzeige
5. LED-Netzstromanzeige (Bett an das Stromnetz angeschlossen)
6. LED-Anzeige EIN (Anzeige leuchtet, wenn die Bedieneinheit aktiviert ist)
7. Akku-Ladezustandsanzeige und Akku-Fehleranzeige



Essenza 300

Klinikbett

D9R001EZ3-0106_00

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

VERSTELLEN DER BETTVERLÄNGERUNG

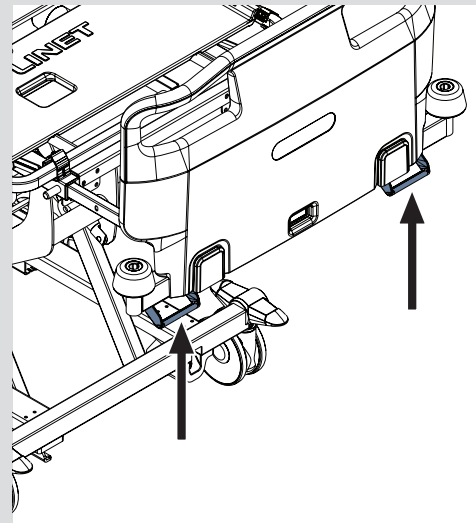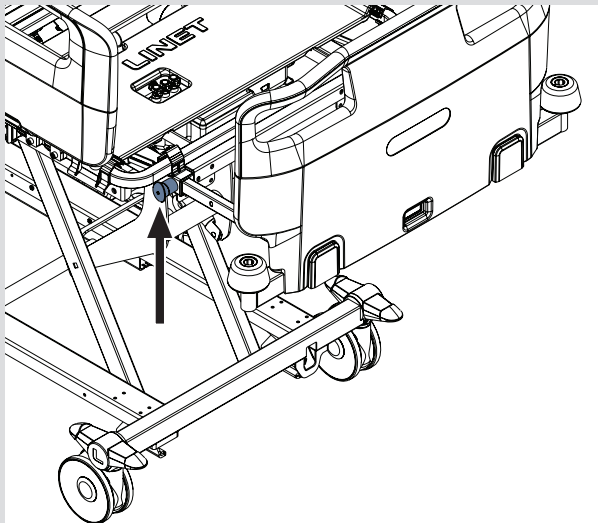

Das Bett verlängern:

1. Die Sicherungsstifte am Fußende auf beiden Seiten des Rahmens herausziehen.
2. Die Sicherungsstifte um 90° drehen.
Die Sicherungsstifte sind entriegelt.
3. Das Fußteil in die gewünschte Position ziehen.
4. Die Sicherungsstifte um 90° drehen und hineindrücken, um die Verlängerungsposition zu fixieren.

Das Bett verlängern:

1. Den Griff der Bettverlängerung zu sich heranziehen und ihn in dieser Position halten.
2. Das Fußteil des Bettes zu sich heranziehen.
3. Das Fußteil schieben, um es in der gewünschten verlängerten Position zu fixieren.
4. Das Fußteil nach innen und außen bewegen, um zu prüfen, ob es fest sitzt.