

Air2Care 5, 6 und 8

CPR-MODUS (2 OPTIONEN)



CPR-Modus durch Trennen der SCU:

■ Trennen Sie den Luftanschluss vom Stecker des Luftanschlusses. Die Luft wird aus der Matratze abgelassen und die Reanimation des Patienten kann beginnen.

ODER

CPR-Modus an der Matratze einstellen:


■ Stellen Sie den CPR-Drehregler auf CPR. Die Luft wird aus der Matratze abgelassen und die Reanimation des Patienten kann beginnen.



DRUCKEINSTELLUNG

Die EASY-SMART-Version stellt den Druck basierend auf dem Gewicht des Patienten automatisch ein. Wenn es sich nicht um die EASY-SMART-Version handelt, folgen Sie der Tabelle auf der SCU.

BEDIENFELD (SCU)

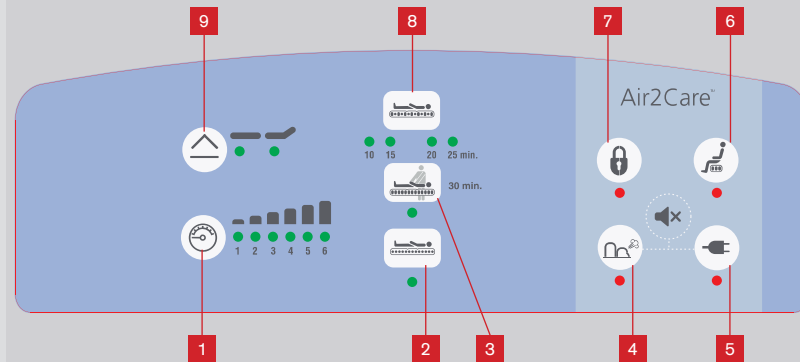

1. Einstellung des Komfortgewichts
2. Taste „Statikfunktion“
3. Taste für max. festen Modus
4. Unterdruckalarmtaste und -anzeige

5. Stromausfalltaste und -anzeige
6. Polsterfunktionstaste und -anzeige
7. Entriegelungstaste und -anzeige
8. Wechsel- und Zykluszeit-Funktionstaste
9. Aufpumptaste Sitzbereich



Air2Care 5, 6 und 8

D9R004VE0-0106_00

INSTALLATION DER MATRATZE

- a) Entfernen Sie die Matratze und sämtliches Zubehör vom Bett.
- b) Legen Sie die Matratze so auf den Bettrahmen, dass die bedruckte obere Abdeckung nach oben zeigt und die Luftschläuche in Richtung des Lattenrosts zeigen. Sichern Sie die Matratze, indem Sie die Gurte am Bettrahmen befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Schnallen sicher befestigt und die Gurte straff angezogen sind.

- c) Sichern Sie bei einem Pflegebett die Seitengurte um die beweglichen Teile des Lattenrosts.

NICHT AN DEN SEITENGITTERN BEFESTIGEN – GURTE KÖNNEN ABREISSEN.

- d) Stellen Sie sicher, dass sich in der unmittelbaren Umgebung keine scharfen Gegenstände befinden, da dies zu Schäden am austauschbaren Matratzensystem führen könnte.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigung des austauschbaren Matratzensystems die Bewegung oder den Betrieb des Bettes nicht beeinträchtigt.

SCU-AKTIVIERUNG

- a) Positionieren Sie die SCU, indem Sie die Haken über das Fußende des Bettes hängen oder das Gerät unter dem Bett auf dem Boden ablegen.
- b) Bringen Sie die Luftschläuche mithilfe des Schnellanschlusses an der SCU an. Stellen Sie sicher, dass die Luftschläuche nicht zwischen Matratze, Bettrahmen und SCU abgeknickt werden.



- c) Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit geerdetem Wechselstrom an.
Stellen Sie vor dem Anschließen an die Steckdose sicher, dass die Spannung kompatibel ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Produkt gut geerdet ist.
- d) Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein. Es kann bis zu 40 Minuten dauern, bis die Matratze vollständig aufgepumpt ist.
- e) Sobald die Matratze ausreichend aufgepumpt ist, erlischt die Niedrigdruckleuchte. Legen Sie den Patienten auf das Bett, und wählen Sie die entsprechende Komfortstufe sowie die Zykluszeit aus. Die EASY-SMART-Version der SCU stellt automatisch die entsprechende Komfortstufe ein, sodass der Bediener die Zykluszeit nur einstellen kann, wenn kein Standardwert von 10 Minuten erforderlich ist.

Führen Sie einen Stabilisationstest durch, um sicherzugehen, dass der Druck der Matratze für die Liegeposition des Patienten ausreichend ist. Schieben Sie Ihre Hand entlang einer entleerten Zelle im (unteren) Sakralbereich unter die obere Abdeckung. Befestigen Sie die Laken lose genug, um sicherzustellen, dass sie den Zellenwechsel nicht behindern.