



+ KURZ-ANLEITUNG

VIRTUOSO™


Luftmatratzensystem





SCU (SYSTEMSTEUERUNG)

ANSCHLUSS DER MATRATZE AN DIE SCU:

Anschluss der Matratze an die SCU wie folgt:

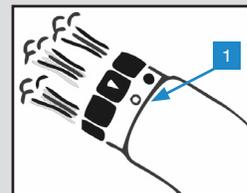

- Luftanschluss muss geöffnet sein (1)
- Anschluss im Winkel von etwa 45° andrücken, bis er einrastet (2)
- Kabel für den Rückenlehnsensor einstecken (3),
- Prozess zur Aktivierung des CPR umgekehrt wiederholen

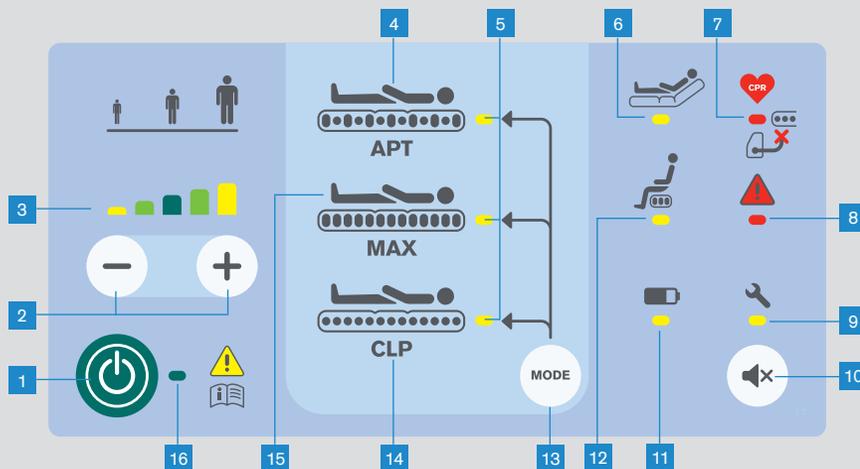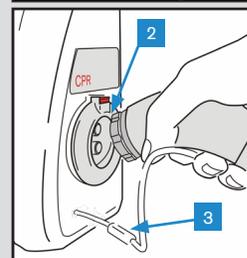

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Aktivierung der GO-Taste | 10. Stumm-Taste |
| 2. Druckregelungstasten | 11. Anzeige für den Batterieladestatus (nur mit Batterie) |
| 3. Druckniveauanzeige | 12. Sitzmodusanzeige |
| 4. Wechseldrucktherapie-Modus | 13. Moduswahltaete |
| 5. Modusanzeigen | 14. konstanter Niedrigdruckmodus |
| 6. Rückenlehne-Statusanzeige | 15. Modus der max. Inflation |
| 7. CPR/Luftanschluss-geöffnet-Anzeige | 16. Stromanzeige (nur mit Batterie) |
| 8. Systemfehler-Anzeige | |
| 9. Wartungsanzeige | |

wissner-bosserhoff GmbH, Hauptstraße 4-6,
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: 02377 / 784-0, Fax: 02377 / 784-163
e-mail: info@wi-bo.de, www.wi-bo.de



KURZ-ANLEITUNG


VIRTUOSO™

Luftmatratzensystem




D9R001VK3A-0206_01

THERAPIEMODI

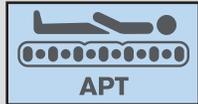


Wechseldrucktherapie

Die Wechseldrucktherapie (Standardmodus) simuliert die natürliche Bewegung eines Patienten und unterstützt dabei die Prophylaxe und Behandlung von Druckulcera. Die Kammern werden in 7,5-minütigen Zyklen aufgepumpt und die Luft wieder abgelassen, sodass die normale, natürliche Schutzreaktion des Körpers vor Druck von außen simuliert wird.

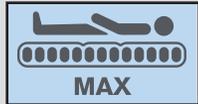

Max. Inflation


Der maximale Inflationsmodus bietet eine starke und stabile Unterstützung der Patientenversorgung. Nach 30 Minuten erfolgt ein automatischer Wechsel in den Alternativmodus zur Verhinderung des Dekubitusrisikos.

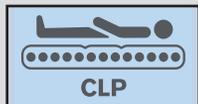

Konstant niedriger Druck

Der Modus für konstant niedrigen Druck hält automatisch den ausgewählten Druck aufrecht, unabhängig von einer Gewichtsverlagerung oder Veränderungen der Position des Patienten, um eine konstante Umverteilung des Drucks zu erzielen.


Auswahl des Therapiemodus

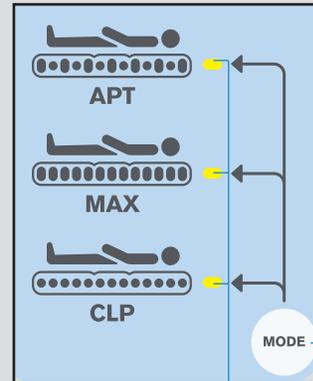

Wählen Sie folgenden Modus aus:

- Aktivierung der Tastatur durch Druck auf die GO-Aktivierungstaste
- Einmaliger oder wiederholter Druck der Modus-Auswahltaste (1), bis die gewünschte Modusanzeige (2) gelb aufblinkt
- Sobald der voreingestellte Druck erreicht wird, leuchtet die Modusanzeige (2) durchgehend

Auswahl des Druckniveaus

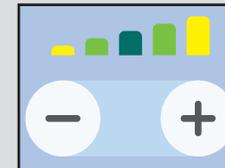

Die Drucksteuerung ermöglicht es dem Pflegepersonal, den Druck in einem voreingestellten Bereich im APT- und CLP-Modus anzupassen.

So regeln Sie den Druck:

- Druck der Taste, - Druckverringering
- Druck der Taste, + Druckerhöhung

Lesen Sie immer das Benutzerhandbuch!

Die angegebenen Gewichtsstufen sind reine Empfehlungen. Welches Druckniveau sich für einen Patienten am besten eignet, hängt von Faktoren wie Gewicht, Gewichtsverteilung und persönlichem Wohlbefinden ab.

■ ■ wissner-
■ ■ bossenhoff