


# KURZANLEITUNG

## PRECIOSO Serie 2

Matratzensersatz oder Auflagesystem




### SCU (BEDIENEINHEIT)

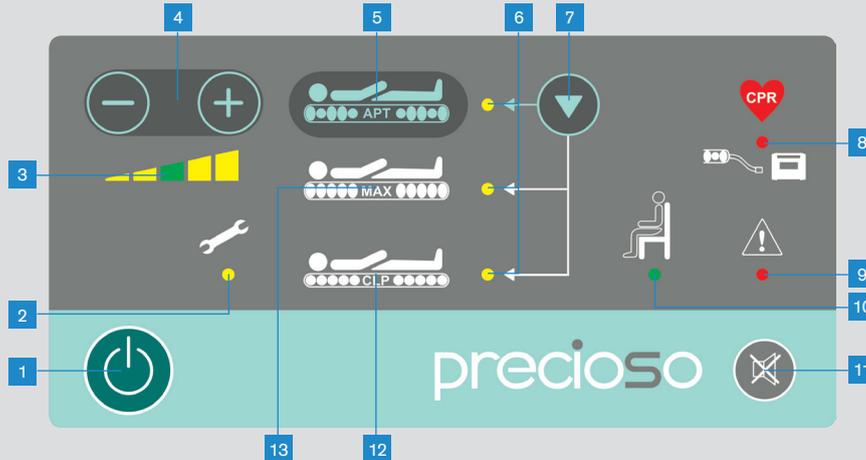

1. GO-Button
2. Service-Anzeige
3. Anzeige der Druckstärke
4. Druckeinstellung
5. Wechseldrucktherapie
6. Anzeige des aktiven Modus
7. Modus-Auswahlta

8. CPR/ Luftanschluss offen
9. Störungsanzeige
10. Sitzmodus
11. Taste lautlos
12. Konstanter Niedrigdruck
13. Maximaler Druck

### MATRATZE MIT DER BEDIENEINHEIT VERBINDEN

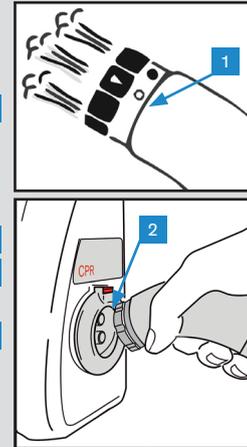

Verbinden Sie die Matratze wie folgt mit der Bedieneinheit:

- Der Luftanschluss muss im geöffneten Modus sein (1).
- Führen Sie den Stecker in einem Winkel von ca. 45° in die Anschlussbuchse und drücken Sie diesen herunter, bis er hörbar einrastet (2).
- Um die CPR-Funktion zu aktivieren ziehen Sie den Schlauch aus der Anschlussbuchse.

# KURZANLEITUNG


9200-0661\_01



## PRECIOSO Serie 2

Matratzenersatz oder Auflagesystem

### THERAPIEMODI

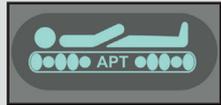

#### Wechseldrucktherapie

Die Wechseldrucktherapie simuliert die natürliche Bewegung eines Patienten und hilft so Druckgeschwüren vorzubeugen. Die Zellen füllen und leeren sich im 7,5-Minuten-Zyklus und simulieren damit die normale Reaktion des Körpers auf Druck für einen natürlichen Schutz.



#### Maximale Füllung


Dieser Modus bietet eine feste und stabile Unterstützung bei der Pflege des Patienten. Nach 30 Minuten schaltet sich der Wechseldruckmodus automatisch wieder ein, um Druckgeschwüre zu vermeiden.



#### Konstanter Niedrigdruck

Dieser Modus hält automatisch den ausgewählten Druck aufrecht, ungeachtet von Änderungen von Patientengewicht oder -position


#### Therapiemodus auswählen

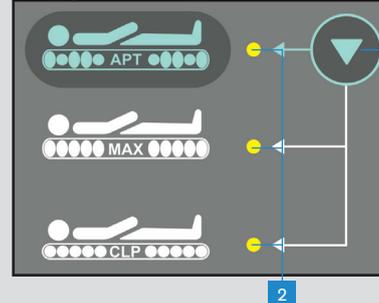

Wählen Sie den Modus wie folgt:

- Aktivieren Sie die Bedienfelder durch Drücken des GO-Buttons.
- Drücken Sie die Modus-Auswahltaste (1) solange bis der gewünschte Modus (2) gelb blinkt.
- Wenn der voreingestellte Druck erreicht ist leuchtet die Anzeige kontinuierlich gelb (2).

#### Druckstärke auswählen

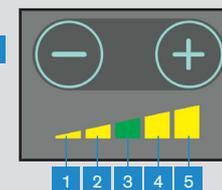

Die Druckkontrolle ermöglicht es dem Pflegepersonal den Druck in einem Voreinstellungsbereich zwischen Wechseldrucktherapie und konstantem Niedrigdruck zu wählen.

**Druck anpassen:**

- Drücken Sie - um den Druck zu verringern
- Drücken Sie + um den Druck zu erhöhen

**Gebrauchsanweisung beachten!**

Die angegebenen Gewichtsstufen sind lediglich Empfehlungen. Welche Druckstärke für den Patienten am besten geeignet ist, hängt vom Gewicht, der Gewichtsverteilung und persönlichem Befinden ab.

 **wissner-  
bosserhoff**