


# KURZANLEITUNG

## ELEGANZA 3 & ELEGANZA 3XC

Krankenhausbett für die Akutversorgung

### SUPERVISOR

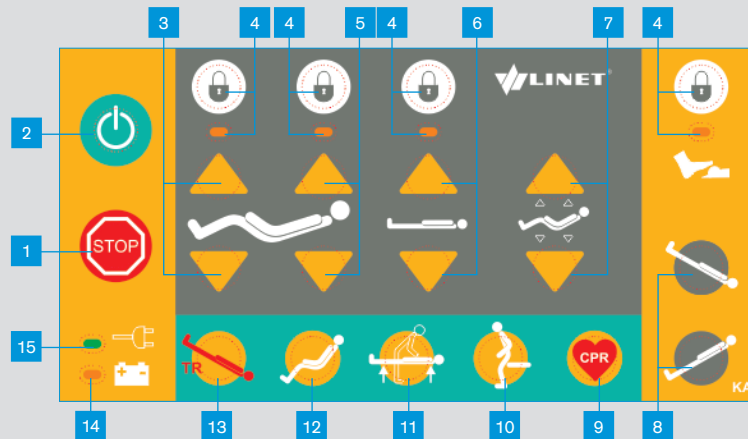

1. Zentrale STOP-Taste
2. Go-Taste aktivieren
3. Oberschenkellehne verstellen
4. Taste und LED Funktionssperre
5. Oberschenkellehne sperren
6. Oberschenkellehne verstellen
7. Autokontur verstellen
8. Trendelenburg and Anti-Trendelenburg
9. CPR (Reanimation)
10. Mobilisationsposition
11. Untersuchungs-Position
12. Herzstuhl-Position
13. Notfall-Trendelenburg
14. Netzstromanzeige
15. Akku-Ladezustand

### FUNKTIONEN BLOCKIEREN


#### Sperren von Funktionen

- (1) Aktivieren Sie das Tastenfeld (auf dem Supervisor) durch Drücken der GO-Taste (2)
- (2) Drücken Sie die entsprechende Funktionssperre (4)
- (3) Die entsprechende Sperr-LED leuchtet auf und die Funktion ist gesperrt.



#### Entsperren der Funktionen

- (1) Aktivieren Sie das Tastenfeld (auf dem Supervisor) durch Drücken der GO-Taste (2)
- (2) Drücken Sie die entsprechende Funktionssperre (4)
- (3) Die entsprechende Sperr-LED erlischt und die Funktion ist entsperrt.

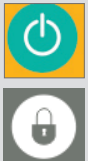


wissner-bosserhoff GmbH, Hauptstraße 4-6,  
58739 Wickede (Ruhr)  
Tel.: 02377 / 784-0, Fax: 02377 / 784-163  
e-mail: info@wi-bo.de  
www.wi-bo.de

## ELEGANZA 3 & ELEGANZA 3XC

Krankenhausbett für die Akutversorgung

### BETTDESCHEIBUNG

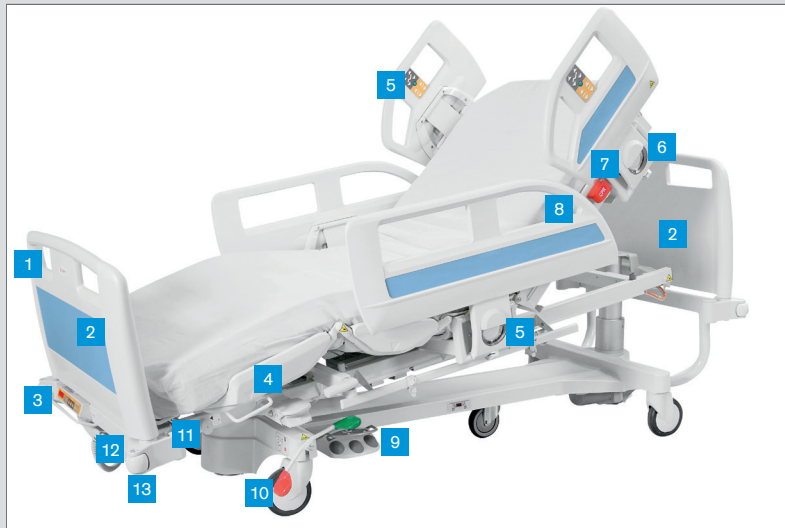

- |                               |                                       |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Supervisor                 | 6. Schwenkbereichsanzeiger            | 11. Bettverlängerung            |
| 2. Kopf- und Fußende          | 7. CPR-Auslösung                      | 12. Bettzeug-/Supervisor-Ablage |
| 3. Integriertes Wiegesystem   | 8. Halter für Röntgenkassetten (E3XC) | 13. Stoßschutzleiste            |
| 4. Viergeteilte Liegefläche   | 9. Fußschalter                        |                                 |
| 5. Integrierte Bedienelemente | 10. Zentralfeststellung               |                                 |

### CPR

#### CPR-Notabsenkung der Rückenlehne

- (1) Drücken Sie den (roten) CPR-Hebel nach oben.
- (2) Rückenlehne am Bügel nach unten drücken.



#### Elektrische CPR-Notabsenkung

Alle Liegeflächenteile fahren automatisch in die unterste Position.

- (1) Drücken Sie die GO Taste
- (2) Drücken Sie die CPR Taste bis die tiefste Position erreicht wurde.

