


KURZANLEITUNG

IMAGE 3

universelles Klinikbett mit Niedrigposition




SUPERVISOR

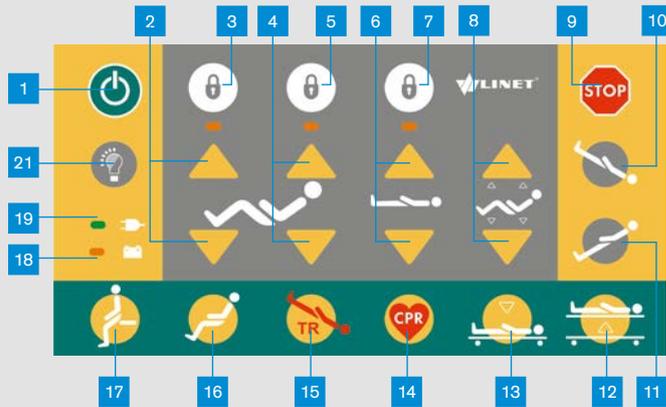

- 1. Go-Taste aktivieren
- 2. Oberschenkellehne verstellen
- 3. Funktionssperre Oberschenkellehne
- 4. Rückenlehne verstellen
- 5. Funktionssperre Rückenlehne
- 6. Bethöhe verstellen
- 7. Funktionssperre Höhenverstellung
- 8. Autokontur verstellen
- 9. Zentrale STOP-Taste
- 10. Trendelenburg
- 11. Anti-Trendelenburg
- 12. Untersuchungs-Position
- 13. Niedrig / Schlafposition
- 14. CPR (Reanimation)
- 15. Notfall-Trendelenburg
- 16. Herzstuhl-Position

HANDSCHALTER

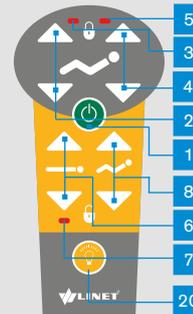

- 17. Mobilisationsposition
- 18. Akku-Ladezustand
- 19. Netzstromanzeige
- 20. LED Leuchte
- 21. Nachtllichtsteuerung

FUNKTIONEN SPERREN

Sperrn der Funktionen

1. Aktivieren Sie das Tastenfeld (auf dem Supervisor) durch Drücken der GO-Taste (1)
 2. Drücken Sie die entsprechende Funktionssperre (3, 5 oder 7)
- Die entsprechende Sperr-LED leuchtet auf und die Funktion ist gesperrt.

Entsperrn der Funktionen

1. Aktivieren Sie das Tastenfeld (auf dem Supervisor) durch Drücken der GO-Taste (1)
 2. Drücken Sie die entsprechende Funktionssperre (3, 5 oder 7)
- Die entsprechende Sperr-LED erlischt und die Funktion ist entsperrt.


wissner-bosserhoff GmbH, Hauptstraße 4-6,
58739 Wicked (Ruhr)
Tel.: 02377 / 784-0, Fax: 02377 / 784-163
e-mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

IMAGE 3

universelles Klinikbett mit Niedrigposition




BETTDESCHEIBUNG

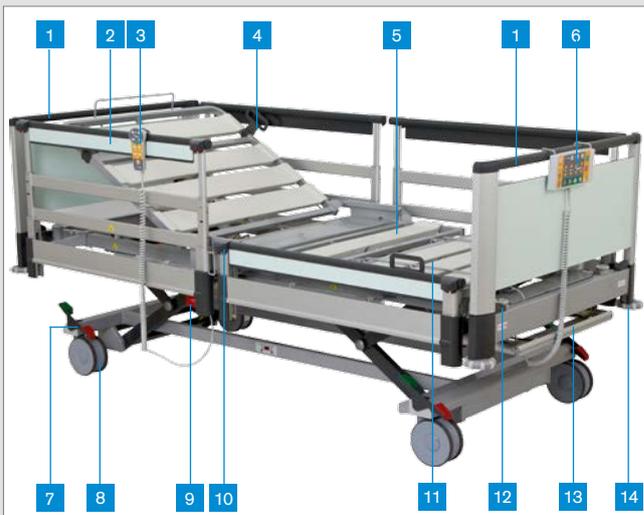

- 1. Kopf- und Fußende
- 2. Geteilte SafeFree Seitensicherung
- 3. Handschalter
- 4. Matratzenbegrenzungsbügel
- 5. Oberschenkellehne
- 6. Supervisor
- 7. Zentralfeststellung
- 8. Rolle
- 9. CPR-Auslösung
- 10. Auslösung der Seitensicherung
- 11. Unterschenkellehne
- 12. Schnellverschlüsse zur Entriegelung der Bettenden
- 13. Bettzeug-/Supervisor-Ablage
- 14. Wandabweisrolle

ZENTRALFESTSTELLUNG

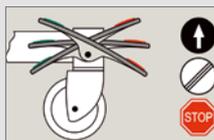


- Vorwärtsbewegung**
Die fünfte Rolle bestimmt die Richtung
- Frei beweglich**
Alle Rollen sind ungebremst
- Gebremst**
Alle Rollen sind gebremst

PLUG & PLAY




- Handschalter**
Der Handschalter kann einfach an das Bett gekoppelt bzw. vom Bett entfernt werden. Dazu den Adapter am Handschalterkabel einfach in den Plug & Play Adapter nahe der Zubehörschiene einstecken bzw. herausziehen.

SEITENSICHERUNG

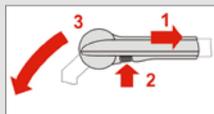

- 3/4-Seitensicherungen**
- Fassen Sie an die Auslösemechanik
- Ziehen Sie die Seitensicherung zum Kopfende 1
- Drücken Sie den Auslöseknopf 2
- Klappen Sie die Seitensicherung zusammen 3

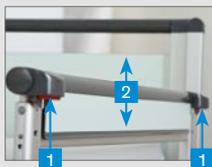

- Geteilte SafeFree Seitensicherung**
- Greifen Sie die Seitensicherung.

- Drücken Sie beide Auslöseknöpfe an der Seitensicherung 1
- Heben Sie die Seitensicherung an bzw. lassen Sie diese herunter 2

CPR



- Drücken Sie den (roten) CPR-Hebel nach oben.
- Rückenlehne am Bügel nach unten drücken.

UNTERSCHENKELLEHNE



- Unterschenkellehne am Begrenzungsbügel nach oben ziehen
- Zum Absenken ganz nach oben ziehen und dann in die unterste Stellung bringen.

SCHNELLVERSCHLÜSSE BETTHÄUPTER



VERRIEGELT



ENTNEHMBAR