

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Elegancia funcional para el cuidado asistencial

SafeSense®

Asistente Bed Exit



# Asistente Bed Exit

¿Qué significa realmente?

SafeSense® avisa a las enfermeras cuando el residente o paciente abandona o se levanta de la cama. Así se pueden detectar las caídas con antelación y reducir sus consecuencias. Básicamente, el asistente Bed Exit funciona como un semáforo. El sistema es muy fácil de entender:



Temporizador de  
aviso desactivado



Temporizador de  
aviso activado

→ por ejemplo, 15 minutos para  
ir al baño todas las noches



El tiempo preprograma-  
do ha transcurrido

→ Señal al sistema de aviso  
a enfermeras

# SafeSense® = seguridad + libertad

de día y de noche gracias a un sistema de sensores de salida de la cama inteligente

Prevención de caídas constante para un nivel de seguridad máximo. Para eso está el sistema asistente Bed Exit SafeSense® de wissner-bosserhoff.

Los porcentajes nacionales de caídas en residencias de mayores y clínicas están en 1,5 caídas por cama al año\*. Los daños a la salud resultantes de las caídas son a menudo graves en el caso de las personas mayores y, en el peor de los casos, pueden ser irreversibles.


Con SafeSense® se puede mejorar considerablemente el nivel de seguridad durante los turnos con poco personales como por ejemplo, de noche o en fines de semana. Durante la noche, el sistema asistente Bed Exit puede reducir la necesidad de protecciones laterales. Por lo tanto el residente o paciente tiene más libertad. La iluminación nocturna automática ayuda al residente o paciente a encontrar el baño por la noche. Se activa automáticamente cuando el residente o paciente abandona la cama y se apaga cuando vuelve. Además, con el temporizador de aviso a enfermeras se puede ajustar el intervalo de tiempo de forma continua según los niveles de movilidad individuales del residente o paciente.

# 5

millones de caídas  
de personas mayores  
al año:

casi un tercio de las personas de 65 años y de mayor edad; así como como la mitad de las personas de igual o más de 80 años se caen al menos una vez al año. Sólo en Alemania ocurren alrededor de 5 millones de caídas de personas mayores al año.

(Fuente: Gesundheit und Krankheit im Alter.  
Editor: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt / Clemens  
Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen / Thomas

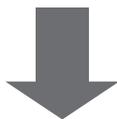

Prevención con  
las camas bajas  
sentida



Prevención con  
cama clinica  
universal baja  
image 3



# Prevención de caídas en residencias de ancianos y clínicas





## Más seguridad – Menos caídas/FEM\*

- Tiempo de reacción más rápido en caso de caídas
- Mayor nivel de seguridad para los turnos de noche y de fin de semana
- Ideal en combinación con las camas bajas sentida e image 3 así como con las protecciones laterales SafeFree®
- Implementación sistemática de los descubrimientos sobre la iniciativa reducción de restricciones, conocida como el camino a la salud Werdenfels\*\*



## Mantener la movilidad

- Con camas bajas sentida / image 3
- Con sistema estratégico de 3 paradas de WIBO
- Con las protecciones laterales WIBO Safe-Free®



## Protección individual

- Las idas al baño por la noche se aseguran mediante una luz nocturna conmutable sensorialmente
- La temporización flexible del aviso a enfermeras (desde 0 hasta 30 min.) se ajusta a la movilidad del residente/paciente



## Las ventajas para su institución

- Seguridad en la inversión
- Seguridad para el paciente o usuario de la cama en todas las posiciones de trabajo
- Seguridad legal del personal asistencial sin necesidad de tener en cuenta otras medidas adicionales
- Rendimiento y efectividad de las labores realizadas
- Sin costes adicionales en accesorios de seguridad
- Trabajo eficaz con correas de fijación

# Así se pide SafeSense®

## Para camas de cuidados WIBO



- Integrado como opción
- Como kit para equipación posterior para todas las camas de cuidados eléctricas de wissner-bosserhoff (a partir del 2002)
- Disponible como versión con o sin cable


## Para cama clínica image 3



- Disponible como opción
- Disponible como versión con o sin cable

# Componentes SafeSense®


## Colchoneta con sensor 2

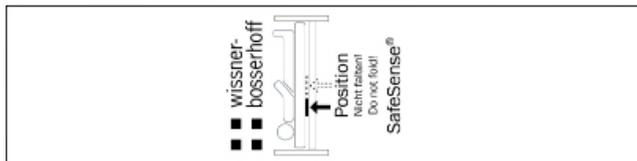


Artículo 02-000781  
80 x 20 cm

## Kit de conexión


Cable adaptador con y sin interruptor de encendido/apagado y los conectores necesarios para conectar el sistema de aviso (según especificación del cliente) para modelos con cable e inalámbricos

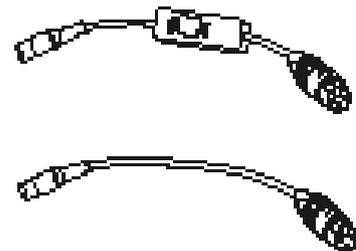


## Bed-Exit-Box 2

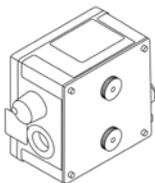

Artículo 04-1851  
con soporte universal disponible como versión con o sin cable

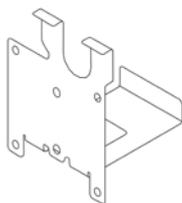

Artículo 01-011193  
Placa de retención para motor DU09

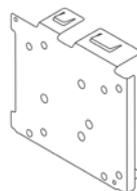

Artículo 01-011194  
Placa de retención para motor Q7

# Receptor de ondas de radio

¡Disponible solo para camas de cuidados!



Receptor de llamadas para aviso a enfermeras

- El enchufe-adaptador WIBO se puede usar con todos los tipos de dispositivos de aviso a enfermeras
- Radioreceptor miniatura
- Se pueden grabar 32 canales  
→ Equipamiento individual de la habitación según los deseos o necesidades del residente
- Con función de cuidados. La llamada se bloquea durante 15 min.



Emisor para toma

- Avisos acústicos y visuales a enfermeras
- Confirmación sencilla directamente desde el receptor de llamadas
- Especialmente idóneo para usar en pequeñas residencias de ancianos y grupos residenciales sin sistema de aviso a enfermeras
- ¡De bajo consumo eléctrico! En modo stand-by, solo usa 0.3 W



Receptor para toma

- Por ejemplo, enciende la luz de orientación o la lámpara de pie en el cuarto
- Se pueden grabar 32 canales
- La señal de radio es activada y enviada automáticamente cuando se abandona la cama
- ¡De bajo consumo eléctrico! En modo stand-by, solo usa 0.2 W



Teléfono de pulso incl. brazaletes emisor

- Central de teleasistencia a domicilio con teléfono incluido.
- La llamada recibida es transmitida a tres números preprogramados
- Dispositivo manos libres integrado, le permite hablar con el residente durante 3 minutos
- Pantalla iluminada

## Funcionamiento



Colchoneta con sensor



Bed-Exit-Box 2



Receptor

(cable/inalámbrico)

## Recomendaciones de uso

	RA*/AA* <u>con</u> aviso a enfermeras	Pequeñas RA*/AA* y grupos residenciales <u>sin</u> aviso a enfermeras	Cuidados en el hogar
Bed-Exit-Box 2	Cable: ✓		
	Radio: ✓	✓	✓
Receptor de llamadas para	✓		
Emisor para toma		✓	✓
Receptor para toma	✓	✓	✓
Teléfono de pulso incl. brazaletes emisor		✓	✓

**Members of LINET Group**

**LINET Iberia**

Calle Bruselas 8 | 28232 Las Rozas

Tel.: (+34) 91 640 95 50 | Fax: (+34) 91 640 95 72

E-Mail: [linetiberia@linet.com](mailto:linetiberia@linet.com) | [www.linet.es](http://www.linet.es)



Nº de patente europea:  
EP000001623654  
EP000002052707

